

CT装置 Brilliance iCT 計画停電時の対応について

停止方法（電源オフ）に関する内容

- ① 操作卓コントロールボックスのキースイッチを OFF にする。
- ② ホストコンピュータをシャットダウンする。（画面上の Logout をクリックした後、Shutdown を選択。）
- ③ CIRS（リコンサーバー）をシャットダウンする。（CIRS 前面の電源スイッチを押したままにし、緑色の LED が消えたらスイッチを離す。2 台、3 台組みサーバーの場合も、サーバー毎にそれぞれシャットダウンする。）
- ④ PDU（電源分配装置）前面にて、ROTOR、STATOR、MAIN INPUT（左上の大きなノブ）の順にブレーカーを落とす。
- ⑤ UPS の電源を切る。（UPS 前面の OFF スイッチを押したままにし、アラームが鳴り始めたら離す。）

起動方法（電源オン）に関する内容

- ① PDU（電源分配装置）前面にて、MAIN INPUT、STATOR、ROTOR の順にブレーカーを入れる。
- ② UPS の電源を ON にする。（UPS 前面の ON スイッチを押したままにし、アラームが鳴り始めたら離す。）
- ③ CIRS（リコンサーバー）の電源を入れる。（CIRS 前面の電源スイッチを押し、緑色の LED が点灯し始めた事を確認する。2 台、3 台組みサーバーの場合も、サーバー毎にそれぞれ電源を入れる。）
- ④ ③の CIRS 電源を入れた後、3 分程度待ってホストコンピュータの電源を入れる。（ホストコンピュータ前面の電源ボタンを押す。）
- ⑤ ホストコンピュータのログイン画面にて User name：CT でログインし、ライセンス確認メッセージが出たら'Yes'をクリックする。
- ⑥ 画面に'CLOSE ESTOP'のウィンドウが出たら、コントロールボックスのキースイッチを回し、ガントリーを起動する。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)までご連絡ください。