

CT装置 MX16 計画停電時の対応について

停止方法（電源オフ）に関する内容

- ① ホストコンピュータにてアプリケーションを Logout した後、画面左下の Start タブから Power Off をクリックしてシャットダウンする。
- ② UPS の電源を落とす。
- ③ ガントリー右側面にある電源スイッチを切る。
- ④ TEAL (CT 装置専用トランス) のブレーカを落とす。(前面のノブが縦になるように回す。)

起動方法（電源オン）に関する内容

- ① TEAL (CT 装置専用トランス) のブレーカを入れる。(前面のノブが横になるように回す。)
- ② ガントリー右側面にある電源スイッチを入れる。
- ③ UPS の電源を入れる。
- ④ ホストコンピュータの前面にある電源ボタンを押す。
- ⑤ ホストコンピュータの Windows ログイン画面にて、User name : CT でログインし、画面左下の Start タブから「MX 16-slice Host」を選んでクリックする。
- ⑥ アプリケーションログイン画面にて User name : CT でログインし、アプリケーションの起動を待つ。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)までご連絡ください。