

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
CS & オペレーション本部
テクニカルサポート

PET/CT装置 GEMINI GXL 計画停電時の対応について

停止方法（電源オフ）に関する内容

- ① PET 収集コンピュータをシャットダウンする。
(CT のコンソールで Home ⇒ Utilities ⇒ PET Shutdown)
- ② PET ワークステーションをシャットダウンする。
- ③ 操作卓コントロールボックスのスイッチを回し、ガントリーをシャットダウンする。
- ④ CIRS (リコンサーバー) をシャットダウンする。
(CT HOST にて Home ⇒ Service ⇒ Recon Shutdown)
CIRS ラックの 3 つのコンピュータの電源を上から、順に落とします。
*それぞれランプが消えるまでスイッチを長押ししてください。
- ⑤ CT コンソールのシャットダウン
(CT のコンソールで HOME ⇒ Logout ⇒ Yes
ログイン画面が表示されたら Shutdown ⇒ OK)
- ⑥ PET GANTRY リア側 SW を全て OFF します。
- ⑦ UPS の電源を切ります。(UPS 前面の OFF スイッチを 5 秒ほどおしたままにする。)
- ⑧ PDU の電源スイッチを OFF にします。
- ⑨ 分電板のブレーカーを切ります。

起動方法（電源オン）に関する内容

- ① 分電板のブレーカーを入れます。
- ② PDU の電源スイッチを ON にします。
- ③ PET ガントリー後部のブレーカーを全て ON にします。
- ④ UPS の電源を ON にします。
- ⑤ PET ワークステーションを起動します。
- ⑥ CIRS コンピュータを起動します。
- ⑦ CT コンソールを起動します。
ホストコンピュータのログイン画面にて User name : pet でログインする。
(CT のホストコンピュータが完全に立ち上がるまで待ちます)
- ⑧ CT のガントリーを ON にします。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)までご連絡ください。