

## PET/CT装置 Gemini TFシリーズ 計画停電時の対応について

### 停止方法（電源オフ）に関する内容

- ① オールシステムをシャットダウンする。  
(画面上の HOME → Service → Shutdown All をクリック)
- ② CT ホストコンピュータをシャットダウンする。  
(画面上の Logout クリックした後、Shutdown を選択。)
- ③ 操作卓コントロールボックスのスイッチを回し、ガントリーをシャットダウンする。
- ④ PET/CT HOST をシャットダウンする。  
(画面上の Logout クリックした後、Shutdown を選択。)
- ⑤ PET GANTRY のリア側 ACQ COMP power switch を OFF する。
- ⑥ TEAL トランスを OFF 位置にする。

### 起動方法（電源オン）に関する内容

- ① TEAL トランスを ON にする。
- ② PET GANTRY のリア側 ACQ COMP power switch を ON する。
- ③ PET/CT HOST を起動する  
ホストコンピュータのログイン画面にて User name : md でログオンする。
- ④ CT HOST を起動する  
ホストコンピュータのログイン画面にて User name : pet でログオンする。
- ⑤ 操作画面が立ち上がった後で
- ⑥ 操作卓コントロールボックスのスイッチを回し、ガントリーを起動する。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)までご連絡ください。