

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

*DreamStation*

Sistema de terapia  
do sono

Redescubra os  
seus **sonhos**



# Natural. Confortável. Durma.

DreamStation suporta o uso a longo prazo por pacientes, criando novas possibilidades para o seu negócio

#### Design voltado para o paciente

DreamStation foi projetada com feedback de centenas de pacientes para fornecer uma experiência com CPAP mais simples para auxiliar o uso aos pacientes novos e experientes em terapias a longo prazo. Um conjunto de ferramentas intuitivas pode ser personalizado por profissionais de saúde para escolher a melhor solução para cada paciente.

#### Aclimatando pacientes nos primeiros dias de terapia

**EZ-Start** pode ajudar pacientes a se adaptarem gradualmente à pressão prescrita de terapia usando um algoritmo inovador de aclimatização de pressão com ajustes automáticos, personalizados para pressão de CPAP durante os primeiros 30 dias.

**SmartRamp** permite que os usuários adormeçam com pressões mais baixas do que o modo de rampa padrão. A pressão do ar permanece baixa até que o paciente tenha um evento respiratório obstrutivo. Neste momento SmartRamp responde com nosso algoritmo automático patenteadado para corrigir as apneias do paciente.

#### Faça progressos todos os dias

Todas as manhãs, os pacientes recebem um resumo do progresso para motivá-los a seguirem suas terapias corretamente. O visor intuitivo mostra uma tendência simples de suas horas de uso noturnas, seguida de um resumo mensal das últimas 30 "boas noites de sono" que tenham mais de 4 horas de uso.

O sucesso da terapia de sono\* ao alcance dos seus pacientes.



My info		
1-Day	7-Day	30-Day
8.0	7.2	6.5
Therapy Hours		



Performance Check simplifica a avaliação do dispositivo em repouso para fácil solução remota de problemas. Projetado para reduzir o tempo e frustração envolvidos na solução de problemas do dispositivo, esta ferramenta robusta permite que você oriente o paciente por meio de um diagnóstico remoto fácil, resultando em um simples resultado de "Aprovado/Falha" para determinar se o dispositivo tem de ser encaminhado para o serviço.

Performance Check pode também gerar um relatório por meio do software de gerenciamento de pacientes Encore em qualquer lugar, permitindo que você solucione as preocupações dos pacientes.

**De acordo com nossa pesquisa, 25% dos dispositivos devolvidos estavam operando normalmente.\*** A verificação de desempenho é projetada para ajudar a reduzir o número de dispositivos normalmente funcionais que são devolvidos para serviço, economizando tempo e custos de entrega.

\* Pesquisa Philips, 2015, dados em arquivo

## Reduzir ajustes manuais

DreamStation pode ajustar-se automaticamente à evolução das necessidades dos pacientes, ajudando a reduzir as dispendiosas visitas em casa e fazendo com que você focalize sua atenção onde necessário.

-  **CPAP-Check**  
Verifica o usuário, a cada 30 horas para determinar se a pressão de CPAP é ideal. Se não, ele automaticamente se ajusta para atender a evolução das necessidades do paciente.
-  **Auto-Trial**  
Oferece terapia em modo CPAP Auto respiração a respiração por um período total de até 30 dias por paciente. Transições para CPAP ou modo CPAP-Check ao fim do período de Auto-Trial.
-  **Opti-Start**  
Fornece a pressão inicial ideal que pode melhorar o conforto do paciente e reduzir a probabilidade de eventos residuais no início da terapia.

DreamStation oferece um design elegante e discreto. Sua tela de cores vibrantes exibe o progresso diário e apresenta menu fácil de usar.

O visor frontal e conexão com o tubo na parte superior do umidificador do DreamStation facilita a sua operação por pacientes enquanto estiverem deitados ou sentados na cama. É pequeno e leve, tornando mais fácil de levar em viagens.

**30%**  
**menor**

DreamStation é 30% menor do que o PAP Aironse10.\*

**40%**  
**mais leve**

DreamStation é quase 40% mais leve que o PAP Aironse10.\*

**63%**  
**mais silencioso**

DreamStation é 63% mais silencioso que ResMed Aironse10.\*\*

## Opinião de **usuários DreamStation**

"Um belo equipamento! Seu desenho moderno, não parece um produto médico. É mais silencioso, também."

"Eu gostei assim que o abri! Eu gostei do jeito que foi disposto e do tamanho — era pequeno, fácil de caber em uma mesa com abajur e meu telefone. "

\* Comparação interna Philips, 2015, dados em arquivo

\*\* Testes de bancada acústica por Orfield Laboratories, Inc. avaliando dispositivos de terapia da Estação de Sonhos da Philips Respironics e ResMed Aironse10 PAP



# Visão orientada Premium

## Sistema de menu intuitivo

Menu de gráficos inspirado na navegação do smartphone para facilitar o uso

## Sensor de luz ambiente

Ajusta automaticamente o brilho da tela para visualização diurna ou noturna



## Feedback de progresso diário

Exibe resultados das 3 noites anteriores de terapia para acompanhar o progresso

**Conexão do tubo na parte superior**

gira 180° para liberdade de movimentos

**Umificador destacável**

O umificador se separa para carregar menos peso

**Design simplificado**


Fácil acesso à câmara de água para enchimento e limpeza

**Sistema de filtragem de ar de duas fases**

Filtro ultrafino fornece filtragem adicional de partículas muito finas

**Cartão SD**

Compartilha facilmente dados do sono com a equipe de cuidados

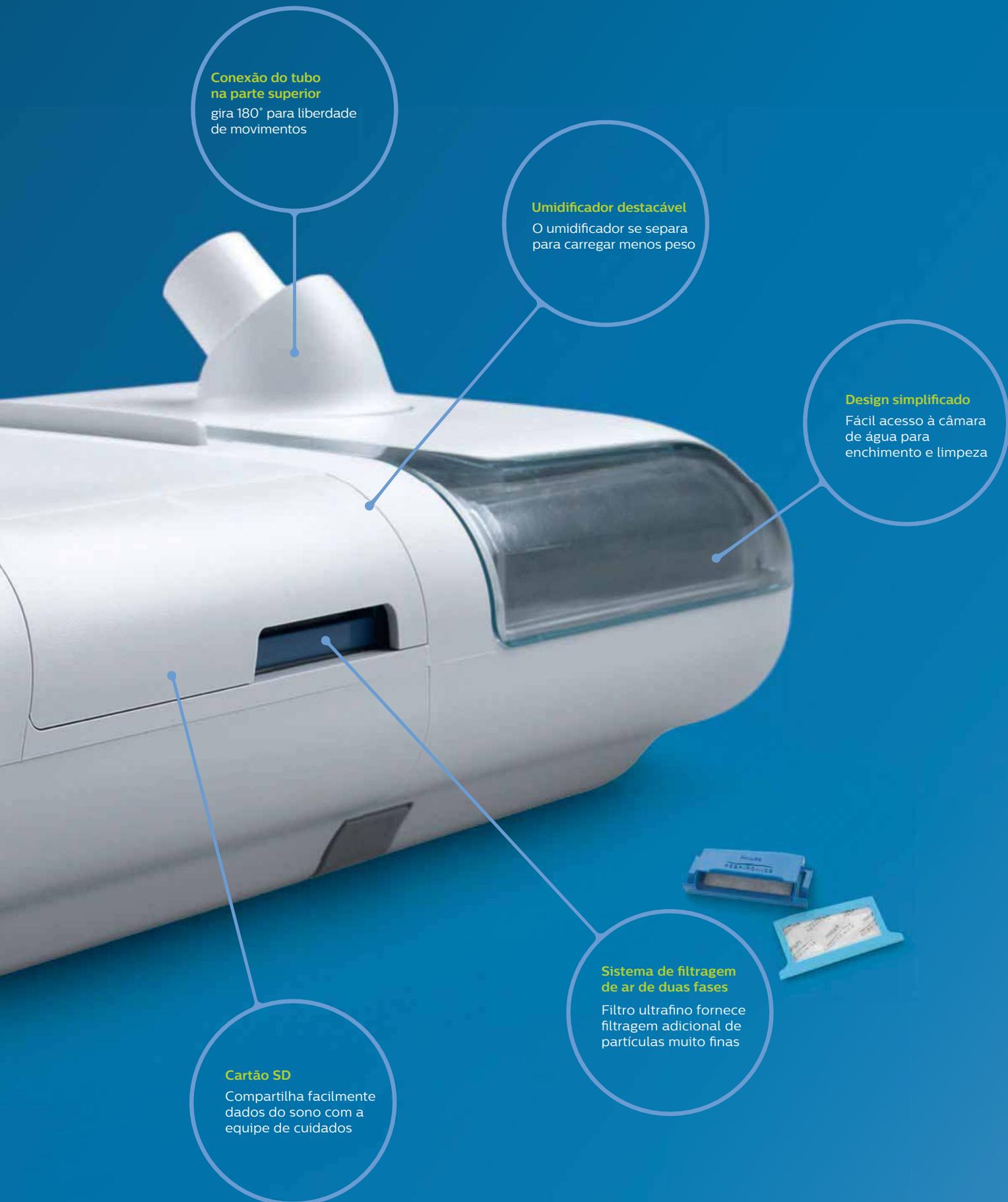

# Informações sobre pedidos

## DreamStation CPAP Auto

Número da peça

DreamStation CPAP Auto	BRX5045S18
DreamStation CPAP Auto + Humidificador + Modem	BRX504H18C

## DreamStation BiPAP Auto

Número da peça

DreamStation BiPAP Auto	BRX700518
DreamStation BiPAP Auto + Humidificador + Modem	BRX700H18C

## Umidificação

Número da peça

Umidificador DreamStation	EUXH
Câmara de água DreamStation	1122520
Modem Wi-fi	100755W
Modem 3G	100650C

## Fonte de alimentação

Número da peça

DreamStation fonte de alimentação 80 watts	1118499
Cabo de alimentação	1005894

## Tubos

Número da peça

Tubo de 15mm Padrão – DreamStation	PR15
Tubo aquecido de 15mm	HT15

## Filtros

Número da peça

Filtro de pólen, reutilizável (1 por pacote)	1122446
Filtro ultrafino descartável (1 por pacote)	1122447
Filtro ultrafino descartável (2 por pacote)	1122518

## Acessórios

Número da peça

Módulo Link	1120293
Oxímetro Nonin	1121694
Sensor de dedo reutilizável (clipe)	936
Sensor de oximetria de dedo, adulto, flex	953
Sensor de dedo reutilizável (modelo Soft)	1062050

## Acessórios de viagem

Número da peça

Mala de transporte DreamStation	1121162
Cabo DC blindado	1120746
Sistema de cabo DC de energia blindado 12V (inclui cabo DC blindado e cabo adaptador de bateria)	1120747



## Parte da **Dream Family**

DreamStation faz parte da Dream Family da Philips Respironics. A Dream Family oferece tecnologia de terapia do sono inovadora e abrangente, como nossa máscara subnasal DreamWear.



Marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips N.V.  
(Royal Philips) ou de seus respectivos proprietários

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Broudy EB 23/09/15 MCI 4106967  
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668  
800-345-6443 • 724-387-4000