

Trilogy 202




Guia de início rápido

- 1 Descrição geral
- 2 Configuração do circuito
- 3 Tela de configuração
- 4 Configuração da prescrição

1

Descrição geral

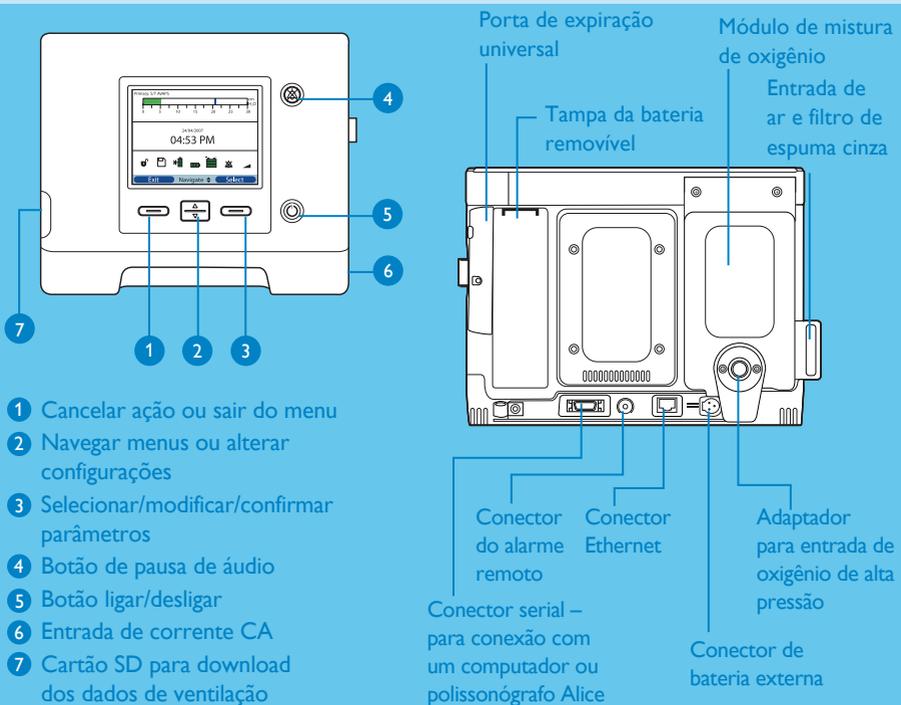

Símbolos e ícones



Modo de acesso total



Cartão SD inserido no ventilador



Pausa de áudio ativo



Rampa ativa



Status da bateria removível opcional



Status da bateria interna



Status da bateria externa




Bateria sendo carregada

2

Configuração do circuito


Para operar o Trilogy202, é preciso configurar o tipo de circuito.

Circuito da porta de expiração passiva

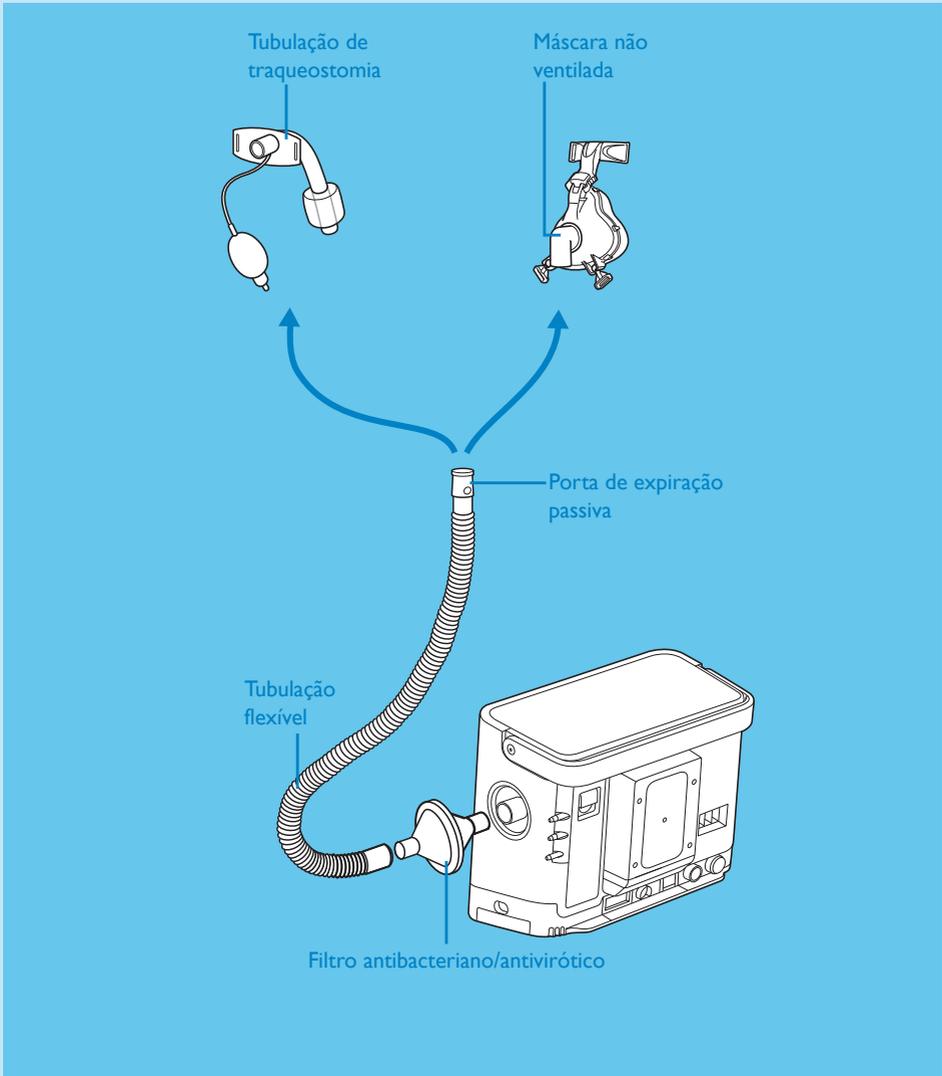


Na tela de configuração selecione “Passivo” para o tipo de circuito.

Válvula de expiração ativa com circuito de pressão proximal nas vias respiratórias

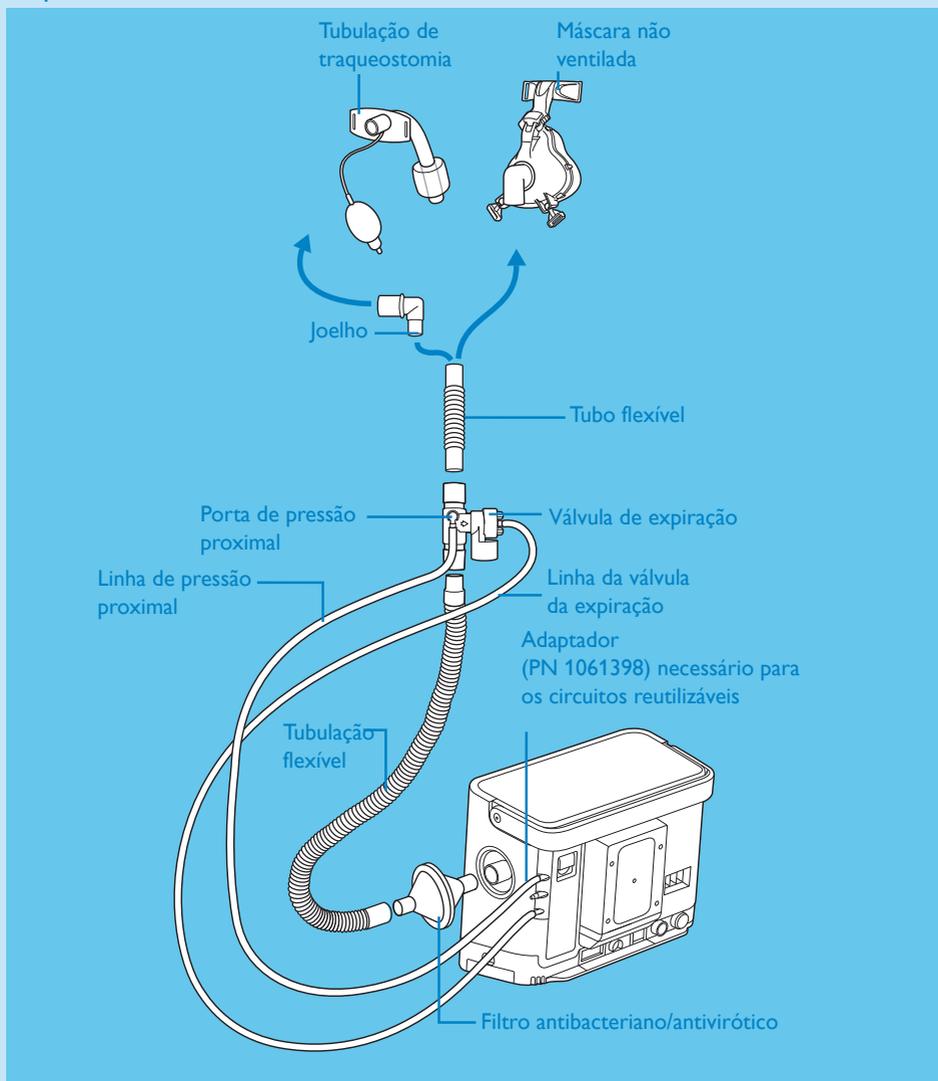

Na tela de configuração selecione “PAP ativa” para o tipo de circuito.

Circuito do sensor de fluxo da válvula de expiração ativa

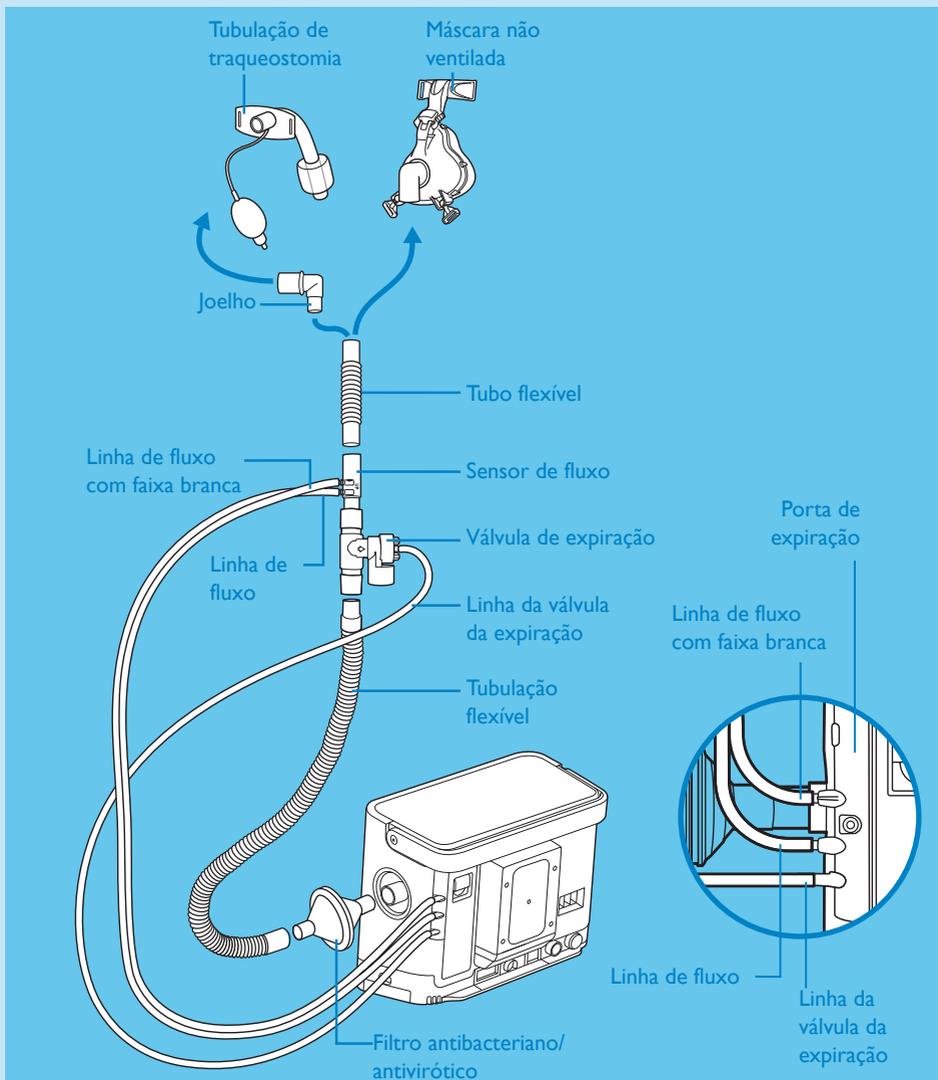


Na tela de configuração selecione “Fluxo ativo” para o tipo de circuito.

3

Tela de configuração

Configuração do tipo de circuito (ativo ou passivo)


Verifique se o Trilogy 202 está desligado antes de seguir os passos descritos abaixo

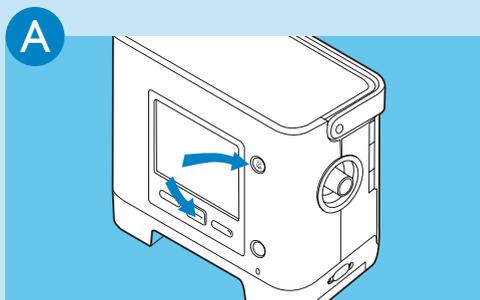


Mantenha pressionado e por alguns segundos para acessar a tela **Configuração**



Selecione **Configurações e Alarmes**

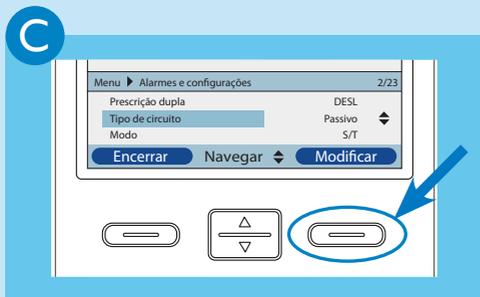


Navegue para **Tipo de circuito** e pressione **Modificar**

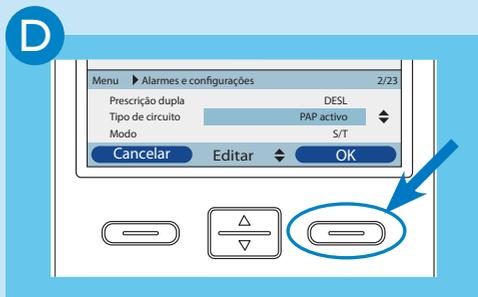

Use para escolher **PAP ativa, Fluxo ativo** ou **passivo** e pressione **OK** duas vezes para confirmar

Configuração do acesso ao menu (Realizada com ou sem o paciente)


Para ativar o acesso total às configurações

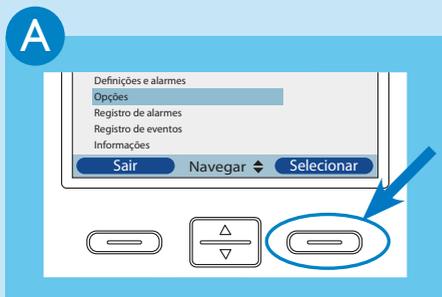


Navegue para **Opções** e pressione **Selecionar**




Pressione **Modificar** para entrar em **Acesso ao Menu**

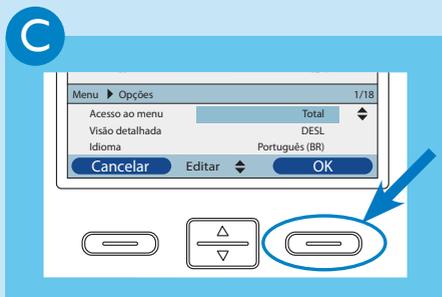

Use  para escolher **Acesso Total** ou **Limitado** e pressione **OK** para confirmar

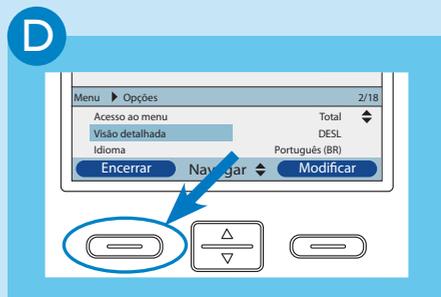


Pressione **Encerrar** e **Sair** para voltar para a **Tela Inicial**

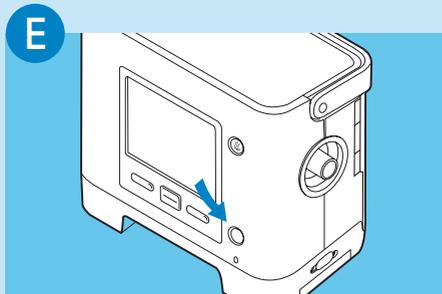

Pressione  para iniciar a terapia **ou** continue navegando no menu para configurar os parâmetros de ventilação

4


Configuração da prescrição

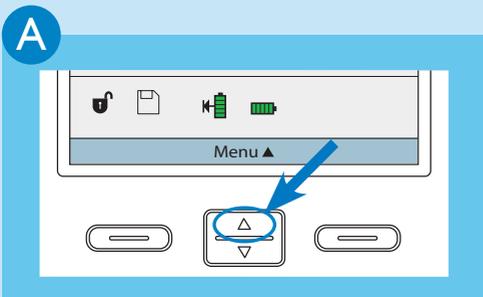

Na tela principal, pressione **Menu**



Selecione **Configurações e Alarmes**

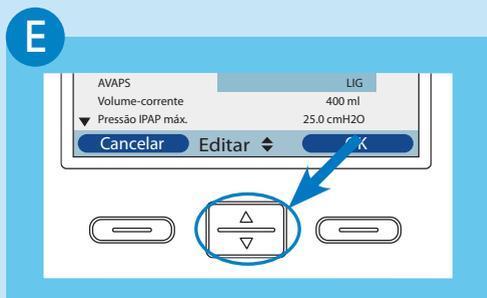


Use **OK** para mudar o valor ou o status da configuração

Prescrição Dupla




Se **Prescrição Dupla** estiver ativada, as duas prescrições devem ser ajustadas de acordo com a explicação anterior

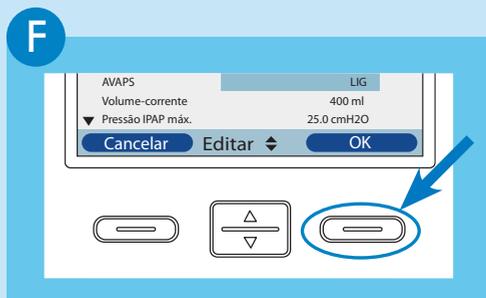


Pressione **OK** para validar a nova configuração




Configure as prescrições primária e secundária

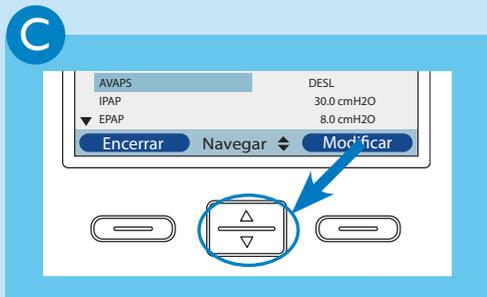

Role para cima e para baixo  para navegar nas configurações e alarmes

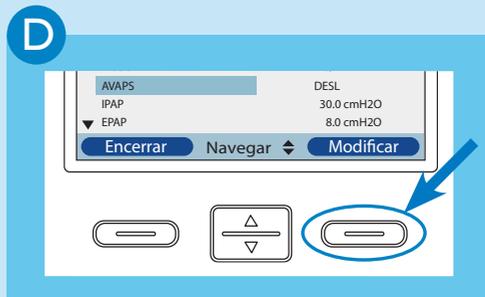

Pressione **Modificar** para mudar o parâmetro destacado em azul

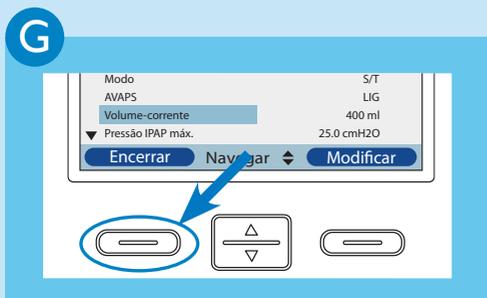

Pressione **Encerrar** e **Sair** para voltar para a tela principal

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 E.U.A.



Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Alemanha



1071459
DSF 7/20/10
Portuguese-BR