

# 飞利浦 监护仪

## 清洁及消毒方案



注意：监护仪进行清洁和消毒前，请仔细阅读该产品《飞利浦用户使用手册》中“清洁和消毒”部分内容，确保安全及可操作性。

### 设备清洁方案

监护仪

1. 选一块无绒布，使用温肥皂水（最高 40°C/104°F）稀释的非腐蚀性去污剂，表面活性剂，**基于氨或乙醇的清洁剂**蘸湿，擦拭设备。
2. **不要使用丙酮或三氯乙烯这类强溶剂。**
3. 清洁监护仪的屏幕时一定要格外小心，因为它比外壳更为敏感。若要清洁触摸式显示屏，请禁用触摸功能。
4. 清洁时，不要让液体进入监护仪的外壳，不要将液体倾倒在监护仪上。不要让水或清洗液进入测量连接器。在连接插座的周围进行清洁，不要在它上面进行清洁。

### 设备消毒方案

监护仪

用于产品和检查室的清洁和消毒技术必须符合所有适用的当地法律或法规。

消毒前要清洁设备。建议使用的消毒剂（以下为举例，详细请参考使用说明书）：

1. **擦拭巾**：Oxivir® Tb 擦拭巾  
（成分为0.5% 加速过氧化氢）
2. **喷剂**：Oxivir® Tb 清洁消毒剂喷剂  
（成分为0.5% 加速过氧化氢）
3. **液体**：Bacillol® 25  
（成分为：乙醇100 mg/g；  
异丙醇 90 mg/g；正丙醇 60 mg/g）

