

飞利浦 MR

清洁及消毒方案



注意：MR设备进行清洁和消毒前，请仔细阅读该产品《飞利浦用户使用手册》中“清洁和消毒”部分内容，确保安全及可操作性。

设备清洁方案

MR

1. 使用**软布蘸取中性肥皂或者清洁剂**（推荐使用液体皂，而非消毒剂），擦拭设备表面，直到表面可见的污染物被清除干净。
2. 使用**软布蘸取清洁的水**，清除剩余颗粒和残留物。
3. 使用**干燥的软布**擦干设备表面。
4. 对于某些绑带，建议使用**中性皂液或者清洁剂**进行清洗（可低于40°C机洗），晾干后使用。
5. 对于数字线圈插头的清洁，请使用专用清洁套装或者酒精、软布和棉签进行清洁。
6. 根据污染物处理规程，处置使用过的清洁材料。
7. 如果发现有破损的垫子、沙袋或者耳机海绵垫等，请即刻更换，切勿继续使用。
8. 如果发现线圈或者线缆有裂缝或者破损，请勿继续使用。

设备消毒方案

MR

用于产品和检查室的清洁和消毒技术必须符合所有适用的当地法律或法规。

推荐消毒剂：异丙醇 70%；乙醇 70%；洗必泰 0.5%溶于70%乙醇

1. 根据“设备清洁方案”清理设备表面。
2. 使用**软布蘸取推荐消毒剂**，擦拭设备表面。
3. 使用**酒精**时，自然晾干表面。
4. 使用**含氯消毒剂**时，消毒完成后还需要使用**软布蘸取清洁的水将设备表面的残留的氯消毒剂清洁干净**，然后自然晾干或者使用干燥的软布擦拭设备表面。
5. **不得使用易燃或易爆性的喷雾剂**，因为产生的蒸汽可能会引爆而造成伤害和/或损坏设备。
6. **不建议用喷雾剂**来消毒MR设备间，因为这样可能会使消毒剂蒸汽渗入设备内部，引起短路或者腐蚀。
7. 根据污染物处理规程，处置使用过的消毒材料。
8. 如果发现有破损的垫子、沙袋或者耳机海绵垫等，请即刻更换，切勿继续使用。
9. 如果发现线圈或者线缆有裂缝或者破损，请勿继续使用。

