

Facile de trouver le bon ajustement

Armature moyenne

L'armature moyenne des masques s'adapte confortablement à la plupart des visages. Si l'armature moyenne n'est pas adaptée, il est préférable de choisir une petite ou une grande armature.



Ajustement correct

Grande armature



Masque trop petit



Ajustement correct

Petite armature



Masque trop grand



Ajustement correct



Changement et nettoyage du coussin

Pour remplacer le coussin du masque, poussez le coussin au niveau du cadre avec l'index et le pouce en avant et en arrière et écarter en même temps le cadre et le coussinet. Nettoyez quotidiennement les différentes parties du masque avec de l'eau chaude et un nettoyant doux et laissez-les sécher à l'air libre.



Attaches magnétiques pour DreamWear facial intégral

Les attaches et la garniture du DreamWear facial intégral contiennent des aimants pour fixer facilement le bandeau au coussin à l'avant.

Remarque: le fonctionnement de certains appareils médicaux peut être affecté par les champs magnétiques. Une vigilance particulière s'impose pour les personnes qui portent des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou des implants cochléaires. Veuillez respecter les remarques spécifiques concernant l'utilisation dans la notice d'utilisation.

PHILIPS

DreamWear

Guide d'ajustement des masques DreamWear



DreamWear masque nasal




DreamWear coussins en gel



DreamWear masque facial intégral

DreamWear – Guide d'ajustement des masques

Pour ajuster la taille du coussin du masque, le gabarit ajustable fourni est maintenu horizontalement sous le nez. La taille du coussin du masque qui convient correspond aux points de contact entre le gabarit ajustable et le bord extérieur des ailes du nez ou de la pointe du nez. L'ouverture du coussin du masque doit être positionnée directement sous les narines. Pour le masque nasal, le coussin doit recouvrir la bouche et le nez. Il doit être positionné de manière à ce que le moins d'air possible puisse s'échapper.

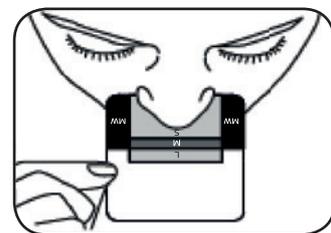

1

Pour le masque nasal et facial intégral, le nez ne doit pas se trouver dans l'ouverture du coussin. Si des parties du coussin dépassent du nez, le coussin n'est pas positionné correctement. Un coussin d'une autre taille peut être nécessaire. Pour adapter le coussin de gel, introduisez les embouts du coussin dans les narines. Choisissez le coussin de telle sorte que les surfaces bleues en gel soient placées de manière confortable et sans interstices sous le nez et n'appuient pas dans les narines.

2

Le cadre du masque, le bandeau et le coussinet sont assemblés et le coussin est placé sous le nez. Positionnez le cadre sur la tête et placez le bandeau sur l'arrière de la tête.

3

Pour le masque facial intégral, fixez tout d'abord les attaches magnétiques du bandeau sur le coussin. Pour ajuster l'emplacement du masque, commencez par retirer les languettes du bandeau des parties en tissu. Ensuite, ajustez la longueur des bandes. Pour les fixer, appuyez de nouveau les languettes sur le tissu.

Remarque: ne serrez pas trop le bandeau.

4

Reliez le tube au connecteur du masque sur le dessus de la tête. Allongez-vous et mettez l'appareil de thérapie en marche pour procéder aux derniers réglages jusqu'à ce que la position du masque soit confortable. Une fois que le masque est réglé, le raccordement du tube coudé doit être posé au sommet du crâne, au milieu.

Remarque: vous trouverez des informations supplémentaires sur le réglage dans la notice d'utilisation.

En savoir plus:

www.philips.ch/fr/dreamwear



DreamWear
masque nasal



DreamWear
coussins en gel



DreamWear
**masque facial
intégral**

