

PHILIPS

Care Orchestrator

Suivi et gestion des patients



La puissance au bout des doigts

Pour une prise en charge plus ciblée et plus efficace de vos patients souffrant de troubles du sommeil et respiratoires

Faciliter la prise en charge des soins


Care Orchestrator vous permet de surveiller et de prendre en charge à distance tous vos patients souffrant de troubles du sommeil et respiratoires à l'aide d'un seul système.

Il rassemble les technologies, les ressources, les personnes et les informations essentielles pour prendre en charge le nombre croissant de patients vivant à domicile et souffrant de troubles du sommeil et respiratoires chroniques. Vous pouvez ainsi offrir les meilleurs soins possibles tout en favorisant la réussite de votre entreprise.

- ✓ Care Orchestrator fait le lien entre les patients, les prestataires de santé à domicile et les médecins.
- ✓ Il transforme les données cliniques brutes en informations patient exploitables et les transmet directement aux équipes soignantes via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- ✓ Tous les membres de l'équipe ont ainsi accès instantanément aux données du patient, pour une meilleure cohérence des soins.
- ✓ Tout le monde peut travailler ensemble pour prendre des décisions cliniques rapides et précises, identifier les patients à risque et agir de manière décisive pour fournir des soins rapides aux personnes qui en ont besoin.



Avertissement : les données fournies par Care Orchestrator ne sont qu'une partie des nombreux éléments à prendre en compte lors de l'évaluation de l'efficacité de la thérapie et ne se substituent pas aux données essentielles pour établir un diagnostic ou une surveillance des patients.

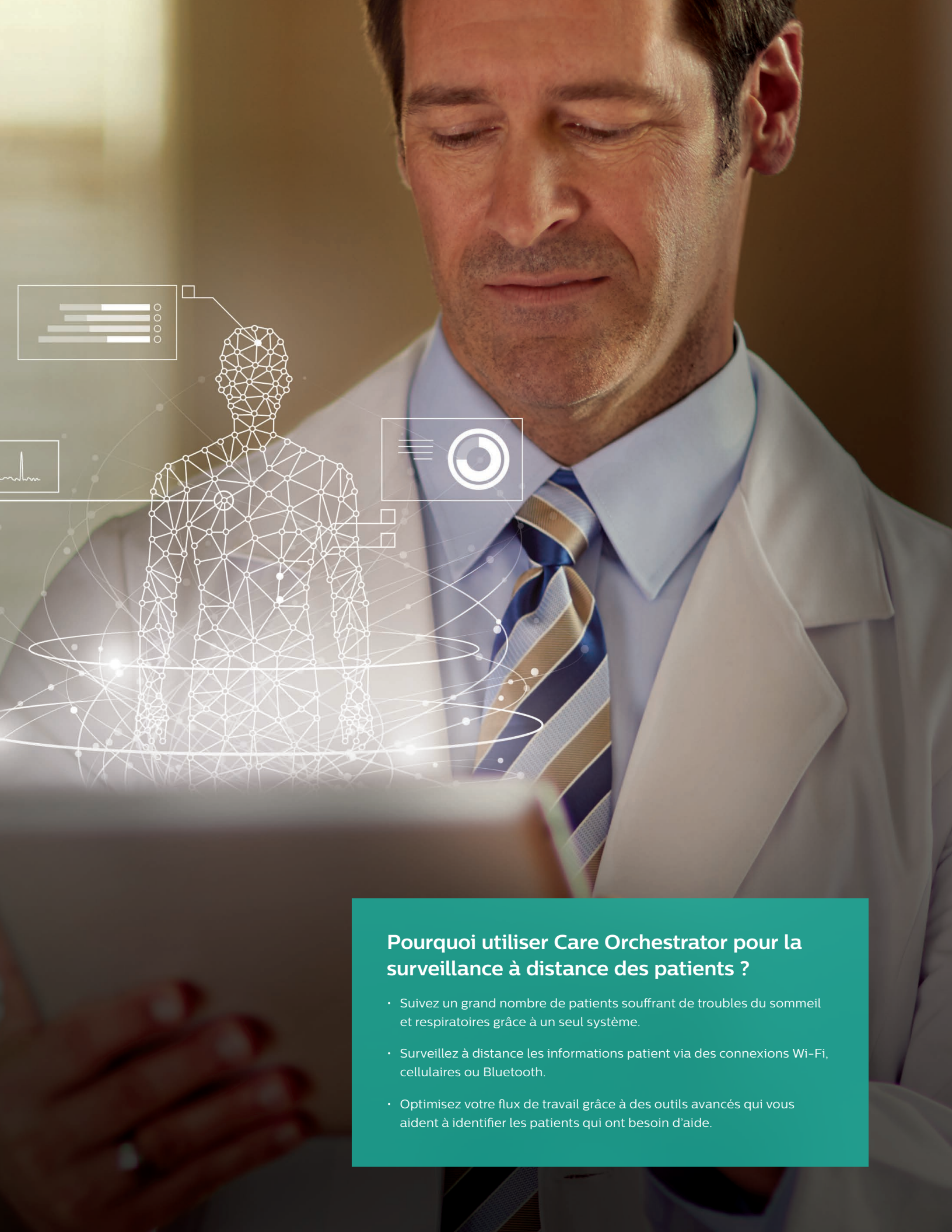

Pourquoi utiliser Care Orchestrator pour la surveillance à distance des patients ?

- Suivez un grand nombre de patients souffrant de troubles du sommeil et respiratoires grâce à un seul système.
- Surveillez à distance les informations patient via des connexions Wi-Fi, cellulaires ou Bluetooth.
- Optimisez votre flux de travail grâce à des outils avancés qui vous aident à identifier les patients qui ont besoin d'aide.



Surveillance et prise en charge à distance

Avec Care Orchestrator, vous pouvez anticiper et résoudre à distance la plupart des problèmes des patients afin de gagner du temps et d'éviter des visites à domicile coûteuses.

L'année dernière, les systèmes basés sur le cloud de Philips ont permis à plus de 5 000 clients prestataires de soins à domicile basés aux États-Unis de gérer en toute sécurité plus de 2,5 millions de dossiers patient.[†]

Intégration / Interopérabilité

Grâce à Care Orchestrator, il est rapide et facile d'accéder aux données patient critiques et de prendre des décisions cliniques informées. Vous pouvez également suivre et documenter le comportement du patient en fonction des règles cliniques ou spécifiques. Care Orchestrator intègre les informations relatives aux patients souffrant de troubles du sommeil et respiratoires aux dossiers médicaux électroniques de l'hôpital, et à vos systèmes d'informations ou de facturation grâce à nos solutions d'interopérabilité (Interface de programmation et export de données)

Rationalisation du flux de travail

Un système unique de surveillance des patients souffrant de troubles du sommeil et respiratoires permet de simplifier les opérations quotidiennes et d'améliorer la productivité du personnel. Partagez les informations patient avec l'ensemble de votre équipe soignante. Vous pouvez même accéder aux données en déplacement via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Simplification de la gestion des tâches


Tirez le meilleur parti du temps de votre personnel en vous concentrant sur les problèmes critiques des patients via le tableau de bord de gestion des tâches. Il vous permet de hiérarchiser les tâches par niveau d'importance et définir si une tâche est liée à un problème clinique ou d'observance. Grâce au tableau de bord de gestion des tâches, votre personnel peut se connecter à Care Orchestrator pour identifier immédiatement les patients qui ont besoin d'aide.

[†] Basé sur les données instantanées issues de la base de données Philips Encore Anywhere. Entreprises américaines avec au moins un utilisateur actif se connectant entre le 23/01/17 et le 23/01/18 = 5 155 (somme des données DME, Laboratoire du sommeil service complet (Full Service Sleep Lab), Pratique médicale (Physician Practice) et Laboratoire du sommeil (Sleep Lab)). Patients uniques téléchargeant des données depuis Encore Anywhere au cours des 365 derniers jours = 2 513 623 au mois de janvier 2018.

Intégré

Connecté

Optimisé

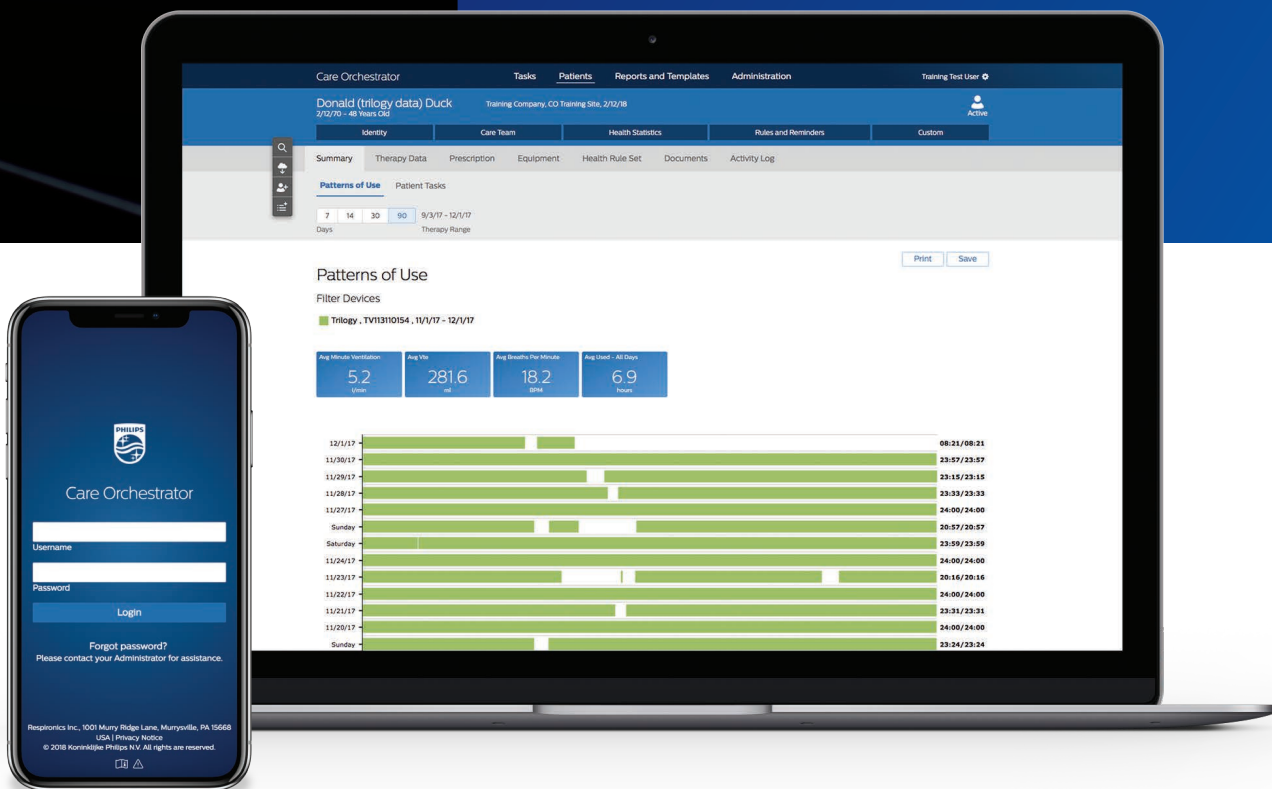

Accélérez les soins. Quelle que soit la façon dont vous les effectuez.

Care Orchestrator est facile à utiliser et sa prise en main est rapide. Son interface intuitive est conçue pour vous aider à effectuer vos tâches quotidiennes en moins de clics et en moins de temps. Grâce à sa conception réactive, il s'adapte automatiquement à votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau.

Fixez vos règles

Gérez vos patients comme vous le souhaitez

Avec Care Orchestrator, vous pouvez :

- **Créer des règles personnalisées** selon différents critères.
- **Adapter les règles d'observance** selon vos protocoles pour les patients
- **Personnaliser les règles** de ventilation pour identifier les patients à risque.
- **Définir les paramètres** de gestion des alertes.
- **Créer automatiquement des notifications** cliniques en fonction des informations d'utilisation et de santé spécifiques de vos patients.

Care Orchestrator vous offre la flexibilité nécessaire pour faire tout cela, et bien plus encore.

Une équipe dédiée pour vos projets de télésuivi

- Disponibilité et réactivité
- Expertise et conseil
- Formation
- Pilotage quotidien de la performance



Du **lundi** au **vendredi**, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
02 51 89 36 00 (choix 3)



Paramétrage des règles

Care Orchestrator | Tâches | Patients | Rapports et modèles | Administrateur

FR TEST SUPPORT TESTS
Site: D'axe d'Amsterdam, Philips Respiratory, Site Luxe sur Luxe, Pays de la Loire, 44000

Vue d'ensemble | Utilisateurs | Autorisations externes | Règles | Journal d'activité

Ensembles de règles

Les ensembles de règles constituent un moyen de gérer les règles en matière de santé, d'utilisation et d'équipement pour différents ensembles de patients.

Mon ensemble de règles d'entité

Voici les règles en matière de santé, d'utilisation et d'équipement assignées au patient au moyen de la sélection d'un ensemble de règles. Les règles peuvent être modifiées, activées et désactivées. Les changements apportés aux règles seront appliqués au patient immédiatement.

- ☐ IAH élevé
 - Quand: L'IAH est supérieur à 15 pendant au moins 1 depuis 7 jours calendaires à compter du dernier jour des données de traitement.
 - Puis: Ajouter une tâche à suivre avec le patient. Avec une priorité de Moyen.
- ☐ Indice d'apnées de voies aériennes déglottées élevé
 - Quand: L'IAH est supérieur à 15 pendant au moins 3 depuis 7 jours calendaires à compter du dernier jour des données de traitement.
 - Puis: Ajouter une tâche à suivre avec le patient. Avec une priorité de Moyen.
- ☒ Moyenne de fuites importante élevée (l/min)
 - Quand: Moyenne des fuites importantes supérieure à 50 pendant au moins 3 depuis 7 jours calendaires à compter du dernier jour des données de traitement.
 - Puis: Ajouter une tâche à suivre avec le patient. Avec une priorité de Moyen.
- ☒ Pourcentage de la nuit en fuites importantes élevé
 - Quand: Le pourcentage de la nuit en fuites importantes est supérieur à 30 pendant au moins 1 depuis 7 jours calendaires à compter du dernier jour des données de traitement.
 - Puis: Ajouter une tâche à suivre avec le patient. Avec une priorité de Moyen.
- ☐ Pourcentage de la nuit en respiration périodique élevée

Générer des tâches et des rapports

Care Orchestrator | Tâches | Patients | Rapports et modèles | Administrateur

TE - DS A-Flex Philips | FR TEST SUPPORT TESTS, 05/03/2021

Identifiant | Equipe soignante | Statistiques thérapeutiques | Règles et rappels | Personnalisation

Resume | Données de traitement | Prescription | Appareil | Documents | Journal d'activité

Vue d'ensemble | Tâches du patient

Appareils de traitement du sommeil | Lateral (plus récente) | 7 | 14 | 30 | 90 | Tous | Personnalisation

Page de temps: Jours (30/03/2016 - 05/04/2016)

Appareils reportés pendant la plage de dates: DreamStation, 30/03/2016 - 05/04/2016

Vue d'ensemble

Respiratoire (jours)	Fuite totale moy	Fuite totale max	Fuite totale min	Fuite totale max/min	Fuite totale max/min	Fuite totale max/min	Fuite totale max/min	Fuite totale max/min
8,24	30,1	8,3	27,0	3,0	8,0	0,3	0,6	11,0

Schémas d'utilisation

05/04/2016

08:50:00-30

09:01:00-01

09:08:00-00

07:07:07

Configurer les notifications cliniques

Care Orchestrator | Tâches | Patients | Rapports et modèles | Administrateur

Mes tâches

Tâches affectées à moi, à mon emplacement ou à mon équipe soignante. Seule la tâche la plus prioritaire pour chaque patient est reportée. L'annulation d'une tâche peut révéler des tâches de priorité inférieure.

Tous | Ignorer

Trier par: Prioritaire

- ☐ Manuel: test tâches
 - TE - DS A-Flex Philips
 - Emplacement: FR TEST SUPPORT TESTS
 - Date de configuration: 05/03/2021
 - Fuseau horaire: Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
 - Affecté: 11/03/2021
 - Tâches: 1
 - Catégorie de l'appareil:
- ☐ Santé: Volume intrinsèque - Seuil
 - TE - Tripp EVO Philips
 - Emplacement: FR TEST SUPPORT TESTS
 - Date de configuration: 05/03/2021
 - Fuseau horaire: Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
 - Affecté: Mon équipe soignante
 - Tâches: 2
 - Catégorie de l'appareil:
- ☐ Rappel: Rappel à 7 jours
 - DS 2
 - Emplacement: FR TEST SUPPORT TESTS
 - Date de configuration: 04/03/2021
 - Fuseau horaire: Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
 - Affecté: Mon équipe soignante
 - Tâches: 1
 - Catégorie de l'appareil:
- ☐ Rappel: Rappel à 7 jours
 - DS 2
 - Emplacement: FR TEST SUPPORT TESTS
 - Date de configuration: 04/03/2021
 - Fuseau horaire: Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
 - Affecté: Mon équipe soignante
 - Tâches: 1
 - Catégorie de l'appareil: Sommeil

Filtrer les tâches

Rôle administratif: 3

Mes tâches: 6

Autres tâches: 97

En cours | Utile

Connecter seulement

Catégorie:

☒ Utilisation

☒ Observation thérapeutique

☒ Réalisation

☒ Non-observance

☒ Santé

☒ Appareil

☒ Adherence Profiler™

Jours: 7 | 14 | 30 | 60 | 90

Pas d'utilisation

☒ Manuel

☒ Rappel

☒ Général

Emplacements du patient:

Tous

Fuseaux horaires:

Tous

Catégorie de l'appareil:

Créer Ma vue par défaut



Document à destination des professionnels de santé

Care Orchestrator est un logiciel conçu par Philips et destiné à être utilisé par des professionnels, pour recueillir, stocker, gérer et visionner les données d'observance créées par de nombreux appareils Philips pour la thérapie respiratoire et le traitement du sommeil à domicile. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, à ce titre, le marquage CE. Lire le guide d'utilisation pour de plus amples informations.

Date de création : Avril 2021 – CA 04/05/2021 PN4545231

© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

www.philips.com