

Comment utiliser un DAE⁽¹⁾ ?

Vérifier les signes d'arrêt cardiaque soudain : perte de conscience
 la victime ne respire plus


1 TIREZ



2 PLACEZ




3 APPUYEZ

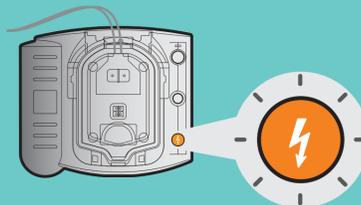


1

Tirez la poignée.

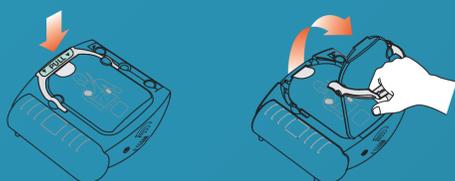

2

Mettez à nu le thorax de la victime.
Nettoyez et séchez la peau, si besoin.

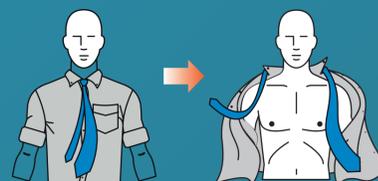


3

Décollez la pellicule adhésive et sortez les électrodes de la cartouche.



4

Décollez chaque électrode du revêtement jaune.

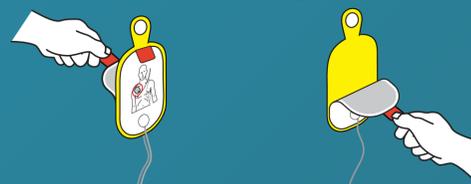

5

Placez les électrodes conformément à l'illustration.




6

Analyse ECG en cours.
Ne touchez pas la victime !



7

Pour délivrer un choc : appuyer sur le bouton **ORANGE**.

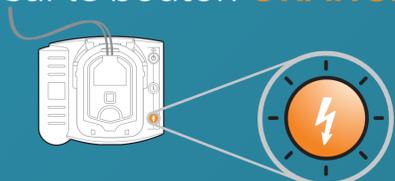

8

Pour l'aide au massage cardiaque : appuyez sur le bouton **BLEU**.



⁽¹⁾Défibrillateur Automatisé Externe
*Innovation et vous

Le DAE HeartStart FRx est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié TÜV SUD 0123. Il est destiné au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec le défibrillateur HeartStart FRx sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation, Mars 2018