

PHILIPS

Apnée du sommeil

DreamWear

Conçu pour oublier que vous portez un masque



DreamWear à contact minimal



DreamWear naso-buccal



DreamWear narinaire

Philips réinvente le masque

Suite à une écoute approfondie des besoins des patients, nos équipes pluridisciplinaires (équipes cliniques, R&D, design, dermatologues...) ont eu à coeur d'apporter des solutions efficaces aux problèmes de marques sur la peau et d'encombrement partagés par ces patients.

C'est pour offrir la meilleure expérience du traitement que DreamWear a été développé.

78%

des utilisateurs
estiment que le
DreamWear ne laisse
pas de traces rouges¹

92%

des médecins
seraient prêts à prescrire
DreamWear¹

innovation  you

Mon DreamWear en 5 étapes

Le choix de la taille du coussin et du harnais est essentiel pour une bonne étanchéité et stabilité du masque et un traitement efficace.

1 Choix de la taille du coussin




DreamWear à contact minimal et DreamWear naso-buccal

Utilisez le gabarit pour connaître la bonne taille de coussin : S, M, L, MW.



DreamWear à contact minimal

Clipsez le coussin sur le conduit puis positionnez le coussin sous le nez et le conduit sur le haut de votre tête.

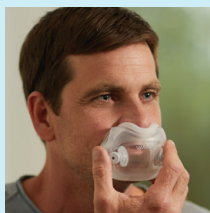

DreamWear naso-buccal

Placez le coussin sous le nez. Il doit aller au-delà du bord extérieur de vos narines et du bout de votre nez.



DreamWear narinaire

Placez les embouts de chaque taille de coussins narinaires (S, M, L) dans vos narines. La bonne taille est celle avec laquelle la partie en gel repose contre vos narines et où seules les extrémités en silicone entrent dans vos narines.

Pour les 3 types de masques



2

Choix de la taille du conduit

Positionnez le conduit entre l'oreille et l'oeil.

Si le conduit est trop proche des yeux, une taille plus grande (LG) est requise.

Si le conduit est trop proche des oreilles, une taille plus petite (SM) est requise.




3

Mise en place du harnais

Positionnez le harnais vers le bas de la tête, ajustez-le si nécessaire sans le serrer trop fort.

NB : avec le coussin naso-buccal, après avoir positionné le harnais supérieur, vous devez également clipser les attaches magnétiques du harnais inférieur et l'ajuster si nécessaire sans le serrer trop fort.

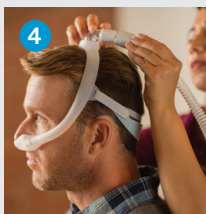

4

Mise en place du circuit

Installez le circuit au-dessus de la tête. Adaptez la position du masque pour un confort optimal et relier le circuit au masque. Lorsque vous avez terminé, le coude doit rester sur le haut de la tête.

Allongez vous et allumez votre machine de PPC pour finaliser les réglages et maintenir votre confort.



5

Entretien

Pour un bon entretien du masque :

- lavez le coussin à l'eau savonneuse chaque jour
- lavez l'ensemble du masque à l'eau savonneuse une fois par semaine

Des tutoriels vidéos pour vous guider



Choix de la taille et mise en place



Réglage des fuites



Entretien facile du masque

Retrouvez la réponse à vos questions pratiques sur www.apneesommeil.fr

Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif.

DreamSolution Philips

Faites le choix d'une solution complète pour une nouvelle sensation de liberté.

www.philips.fr/dreamstation
www.philips.fr/dreamstation-go
Choisissez la PPC adaptée à votre mode de vie



www.philips.fr/dreamwear

www.philips.fr/dreammapper

Application DreamMapper disponible sur les appareils de PPC Philips DreamStation Expert et DreamStation Go.

Téléchargez gratuitement l'application (ou site internet) DreamMapper pour :

- comprendre votre maladie et sa prise en charge
- mesurer l'efficacité du traitement grâce à un **accès à vos données**
- faciliter l'acceptation d'un traitement contraignant dans votre vie

Des patients ont déjà fait le choix du confort :



Avec le DreamWear tu as un sentiment de légèreté et tu as l'impression qu'il n'y a pas de masque.¹



DreamMapper permet de bien s'adapter au traitement et d'évaluer son efficacité.²



À chacun son masque **DreamWear** !

Parce que votre confort ne doit pas être une option, le DreamWear se décline en version nasale, narinaire et naso-buccale (morphologie, respiration par la bouche, habitude d'un format).

- ▶ Liberté de mouvement pour dormir dans votre position préférée
- ▶ Champ de vision dégagé pour lire ou regarder la télévision
- ▶ Prévention des irritations et des traces rouges au réveil



DreamWear est compatible avec tous les appareils de traitement par PPC.

Visualisez le DreamWear en **3D** sur www.philips.fr/dreamwear

1. Validation des bénéfices du masque DreamWear : Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.
2. Validation des bénéfices de DreamMapper : Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur un groupe de 173 000 patients américains de la base de données EncoreAnywhere de Philips Respironics afin de déterminer si la possession de l'application DreamMapper a entraîné une différence dans le taux d'adhésion au traitement par PPC par rapport aux patients n'ayant pas DreamMapper.



DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d'apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV.

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Date de mise à jour : 01/03/2018 - PNI206332