

AED 使用に関する重要なお知らせ JRC 蘇生ガイドライン 2020 に伴う表記変更に関するご案内

2021 年 6 月発行の「JRC 蘇生ガイドライン 2020」において、「小児用」および「成人用」に関して表記変更があり、「小児用」は「未就学児用」へ、「成人用」は「小学生～大人用」へ変更となります。

【JRC ガイドライン 2020 での変更点】

	小学校入学前	小学生以上
変更前	小児用	成人用
変更後	未就学児用	小学生～大人用

それに伴い、弊社におきましては、下記の対応を実施致します。移行期間に関しましては、設置されている製品上の表記とガイドライン用語が異なる場合がございますので、ご使用の際は十分お気を付けください。なお、小学生～大人に対しては、「未就学児用」の패드/キーの使用はできません。未就学児に対しては、「未就学児用」がない場合には、「小学生～大人用」を使用できます。

今回の変更の背景に関しましては下記をご確認ください。

厚生労働省ホームページ：<https://www.mhlw.go.jp/hourei//doc/tsuchi/T220527I0010.pdf>

JEITA ホームページ：https://home.jeita.or.jp/upload_file/20210830101637_60UTImhO3x.pdf

AED 財団ホームページ：https://aed-zaidan.jp/report/20210709_2.html

なお、弊社 AED の対象機種と変更点に関しましては、下記の通りになります。ご不明な点がございましたら、販売店またはフィリップス AED コールセンター¹へお問合せください。

記



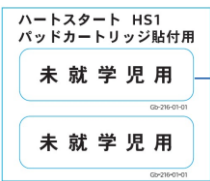
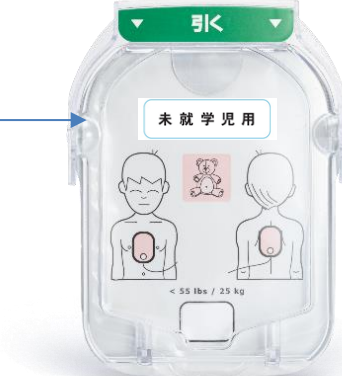
¹ フィリップス AED コールセンター 0120-802-337/ 03-3740-3269

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)



【ハートスタート HS1, HS1+, HS+e, HS1 home²】

以下の同梱シールをご用意しております。シール貼付例をご参照の上、必要に応じて SMART パッド・カートリッジ上へ貼付いただくようお願い致します（貼付の際には、カートリッジ内の白いフィルムは剥さないようご注意ください）。

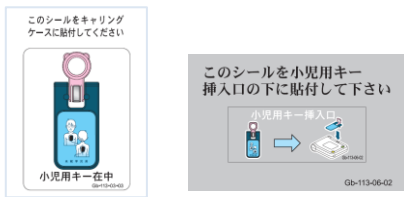
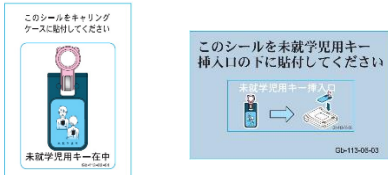
製品番号	同梱シール	シール貼付例
M5066Ae (本体) M5068A (本体) M5071A (パッド)		
M5072A (パッド)		

² 販売名：ハートスタート HS1, 医療機器承認番号：21700BZY00426000, 特定保守管理医療機器／高度管理医療機器
 販売名：SMART パッド・カートリッジ, 医療機器届出番号：13B1X00221000048, 一般医療機器
 販売名：小児用 SMART パッド・カートリッジ, 医療機器届出番号：13B1X00221000049, 一般医療機器

【ハートスタート FRx+, FRx+e³】



キャリングケースへ貼付するシールと、本体の「未就学児用キー」差込口に貼付するシールに関しましては、表記変更済みのシールをご用意しております。

*「未就学児用」と「小学生～大人用」を切り替える為のキー本体には、従来より「未就学児用」と表示しております。

製品番号	変更前	変更後
861304 (本体) 861304e (本体)	 <p>このシールをキャリングケースに貼付してください</p> <p>このシールを小児用キー挿入口の下に貼付して下さい</p> <p>小児用キー挿入口</p> <p>小児用キー在中</p> <p>Gb-113-05-02</p>	 <p>このシールをキャリングケースに貼付してください</p> <p>このシールを未就学児用キー挿入口の下に貼付してください</p> <p>未就学児用キー挿入口</p> <p>未就学児用キー在中</p> <p>Gb-113-05-03</p>

【ハートスタート FR3, FR3 Pro⁴】

FR3 本体の「未就学児用キー」差込口に貼付するシールに関しましては、表記変更済みのシールをご用意しております。

製品番号	変更前	変更後
861388 (本体) 861389 (本体)	 <p>このシールを小児用キー挿入口の左に貼付して下さい</p> <p>小児用キー挿入口</p> <p>FR3/FR3 Pro用</p> <p>Gb-000-33-01</p>	 <p>このシールを未就学児用キー挿入口の左に貼付してください。</p> <p>未就学児用キー挿入口</p> <p>FR3/FR3 Pro用</p> <p>Gb-000-33-02</p>

以上

³ 販売名：ハートスタート FRx, 医療機器承認番号：22000BZX00305000, 特定保守管理医療機器/高度管理医療機器

⁴ 販売名：ハートスタート FR3, 医療機器承認番号：22300BZX00259000, 特定保守管理医療機器/高度管理医療機器