



ドリームマッパーは、患者さんの日々の睡眠治療をサポートする無料のモバイルアプリケーションです。お持ちのスマートフォンやタブレットにダウンロードしてご利用できます。

わかりやすい治療の推移

お持ちのモバイル機器をタッチして、一目で最近一週間の治療状況を確認できます。またあらかじめ設定した目標への達成具合も確認することができます。



親切なリマインダ機能

次回の診察予定や、正しく治療を続けるために大切な治療機器やマスクのお手入れの時期などを事前にお知らせします。



やさしくコーチング

治療に対する思いや続けることへの障害についてやさしく解説し、目標に向けてのサポートをします。



豊富な情報ライブラリ

睡眠呼吸障害や、その合併症に関する基本的な情報や、治療器の取り扱い方法、さまざまな動画を必要に応じて参照いただけます。



お客様コールセンター

お客様コールセンターでは、お電話にてドリームマッパーに関するご質問を承っております。お気軽にお問い合わせください。

0120-48-4159 (よるはよいこきゅう)
受付時間 7:00~22:00 (年中無休 365日対応)

- 注意事項
- アプリダウンロードは無料です。アプリのダウンロード時もしくはアプリをご利用時の通信料はお客様のご負担になります。
 - App StoreやGoogle Playから専用のアプリケーションをダウンロードする必要があります。
 - 画面はイメージで実際とは異なる場合があります。
 - 本アプリケーションの対象OSにつきましてはApp Store またはGoogle Play のページをご確認ください。
 - 通信環境によっては各種機能をご利用いただけない場合があります。
 - Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
 - 本コンテンツは予告なく終了する場合があります。
 - ドリームマッパーは、ドリームステーションと併用するための専用アプリケーションです。
 - ドリームマッパーにおけるプライバシーポリシーは、各アプリケーションストアやドリームマッパーのヘルプから参照できます。またフィリップスのプライバシーに関する通知は、<http://www.philips.co.jp>のプライバシーに関する通知から確認いただけます。
 - 「Android」「Google Play」は、Google Inc.の登録商標です。
 - 「iPhone」「App Store」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
 - 掲載内容は、2022年9月時点のものです。予告なく変更・中止される場合があります。

株式会社フィリップス・ジャパン
〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare


改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその会社の商標または登録商標です。

© 2020 Koninklijke Philips N.V. PN 1127981/220930 R13-VW

1 アプリのダウンロード

検索してインストール

モバイル端末からApp StoreまたはGoogle Playで「ドリームマッパー」を検索して、アプリをインストールしてください。

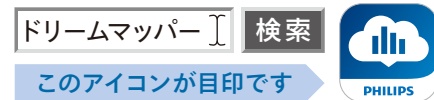

※ iPadでアプリが見つからない場合は、表示設定を「iPhoneのみ」にしてください。

QRコードを読み込みインストール

モバイル端末からご利用のOSに対応したQRコードを読み込みインストールしてください。



インストールが終了したらドリームマッパーを開き、設定を行います。

2 エリアの設定

お住まいの国を選択してください。



3 アカウント作成

はじめてアプリを開くときは、「アカウントの新規作成」を選んでください。




4 必要事項の入力

必要事項を入力してください。
アカウントを作成するため、お使いの端末で使用可能なEメールアドレスをご用意ください。



5 ライセンス契約書

契約書をご一読ください。ご同意いただけましたら□に切り替え、登録ボタンをタップしてください。

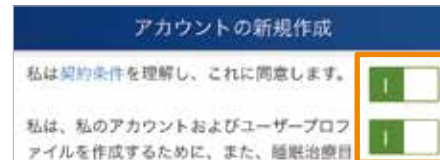


6 マスクの設定

マスクタイプを選択し、マスク一覧からお使いのマスクを選択します。

7 Bluetooth®の設定

この操作は、電源が入った状態の治療器の近くでおこなってください。

アプリと治療器を接続する場合は、Bluetooth®を使用するため「はい」を選択してください。

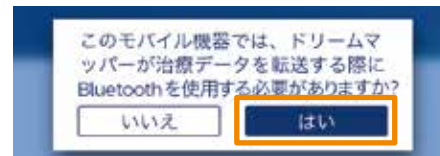

治療器側で、ブルートゥース設定をオンにする必要があります。治療器のメインメニュー → ユーザー設定 → ブルートゥース画面で、回転矢印を表示させてください。

端末側




治療器側



治療器に上記の画面と数字が表示されたら端末側に表示された数字と一致していることを確認して「はい」を選択します。

8 設定の確認


メニューから環境の設定を選択し、設定をタップします。すべての項目が□になっていることを確認ください。

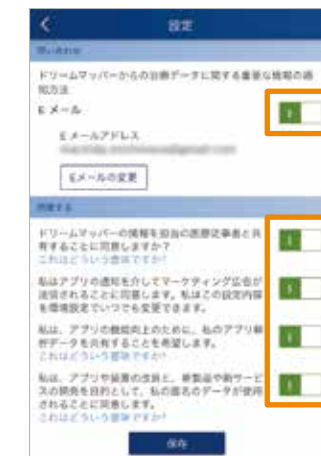

再ペアリングの手順

この操作は、モバイル端末の交換等で再び端末と治療器をペアリングする必要がある場合におこなってください。

メニューから環境の設定を選択し、治療装置をタップします。

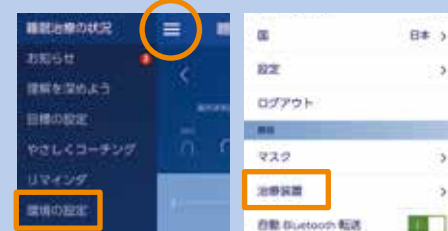

Bluetooth®の使用を□に切り替え、注意事項をお読みください。
ご同意いただけましたら□に切り替え、使用開始をタップします。



以後の手順は、⑦Bluetooth®の設定を参照してください。