

PHILIPS

Healthcare

ドリームウェア フルフェイスマスク
DreamWear Fullface mask





マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。
必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、
裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページの連絡先までお問い合わせください。

ヘッドギアとマスクの名称

*呼気ポート付きマイクロエルボ、外気取入口（左右）および呼気ポートは塞がないでください。

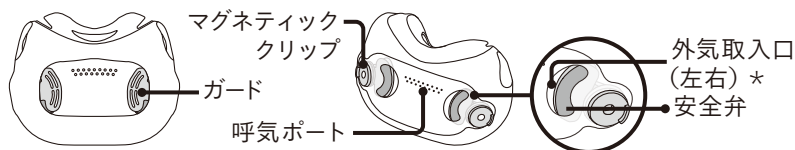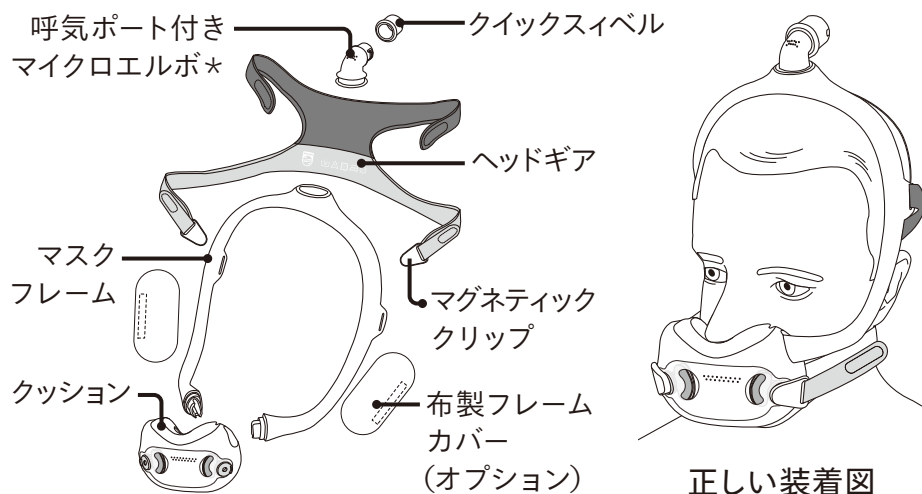

1 マスク装着の手順（1）

マスクを組み立て、クッションを鼻の下に当てます。

フレームを頭の上に配置します。



1 マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアを後頭部にかかるように取り付けます。
呼気ポート付きエルボが頭頂部に来ていることを確認してください。



マグネティッククリップをマスクのクッションに取り付けます。
ヘッドギアのタブをはがし、締めすぎないように注意しながら長さを調整します。





マスクを取り外す際は、クッションをつかみ、鼻から前方に引き離してマグネット式クリップを外します。
次に、クッションとマスクを引き上げて頭から外します。



2 トラブルと対処法



マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？
ヘッドギアと頬の間に指が1本入る
程度に緩めます。

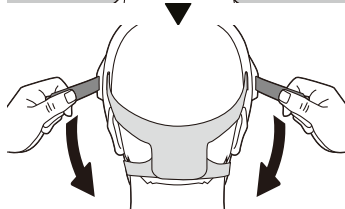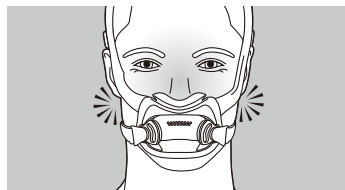



マスクフレームが耳にかぶる場合

マスクフレームが後方に傾き、
耳にかぶる場合は、より小さいサイズ
のマスクフレームをおすすめします。





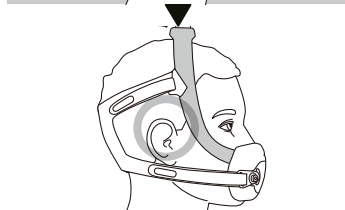
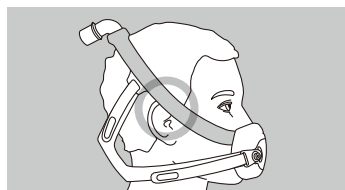


マスクフレームが目に近い場合

マスクフレームが頭の前方に傾き、
目に近すぎる場合は、より大きい
サイズのマスクフレームをおすすめ
します。

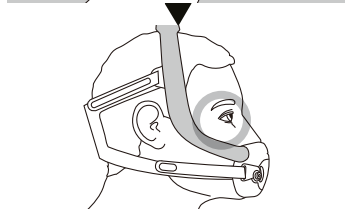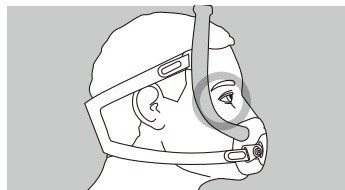






3 マスクの分解／組み立て

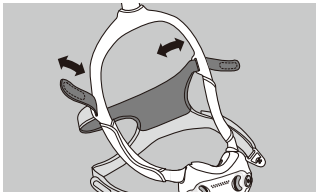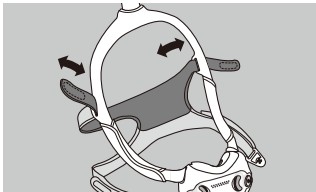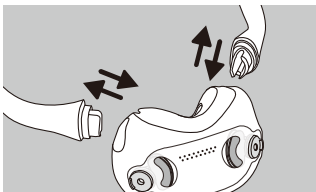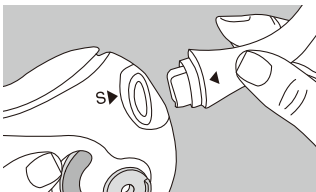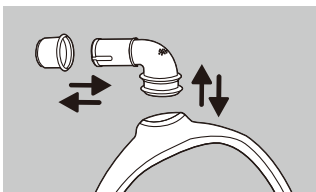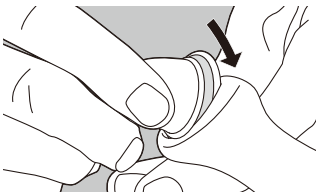部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアタブを外し、マグネティッククリップを回して取り外します。 	ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。 
クッション	クッションをマスクフレームから取り外します。 	所定の位置に「カチッ」とはまるまでマスクフレームに差し込みます 
呼吸ポート 付き マイクロ エルボ	マスクフレームから呼吸ポート付きマイクロエルボを取り外します。 	マスクフレーム上部に、ななめから溝に合わせて差し込みます。 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

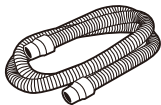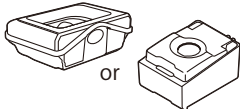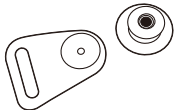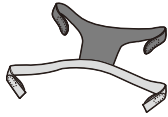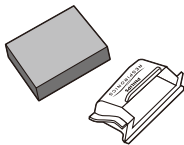頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 水タンク	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	 マグネティッククリップ	クリップはすすいだあと水分を拭き取ってください。
1週間	 ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
2週間 または 1ヶ月	 花粉フィルタ	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。



付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

5 フィルタの取り付け方法



ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

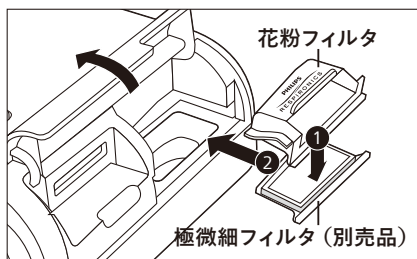

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています


スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス





パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある
「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の
下方にある「ドリームファミリー」をクリック

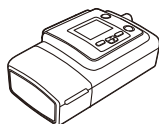


BiPAP A40システム
シルバーシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

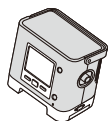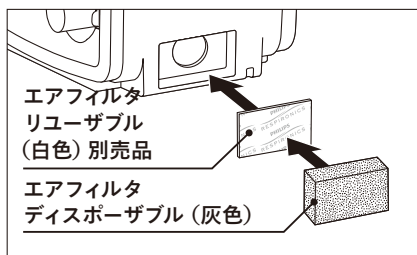

トリロジー
トリロジー plusシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

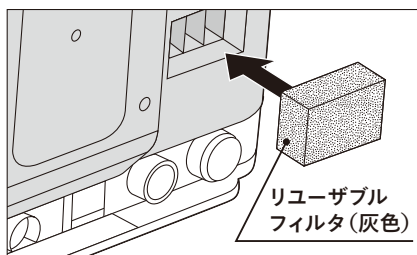

マグネティッククリップについてご注意ください

- 動作中の医療機器（特にペースメーカー、除細動器、人工内耳などの植込型機器）、ニッケル・鉄などの磁性金属から5cm以上離して使用してください。
- 磁気共鳴画像 (MRI) 装置の内部または近くでは使用しないでください。



CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゆう

0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

販売名: ドリームウェア フルフェイスマスク
製造販売届出番号: 13B1X00221000121
一般医療機器 一般的名称: 人工呼吸器用マスク

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域事業所

受付時間 平日9:00～17:30

夜間休日

機器安全センター

0120-633-811

受付時間 平日17:30～翌9:00 土・日・祝祭日

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

©2023 Koninklijke Philips N.V. PN 1140397/240304 R7-PDF