


# PHILIPS

## マスク

アマラビュー フルフェイスマスク  
アマラビュー SE フルフェイスマスク  
Amara View

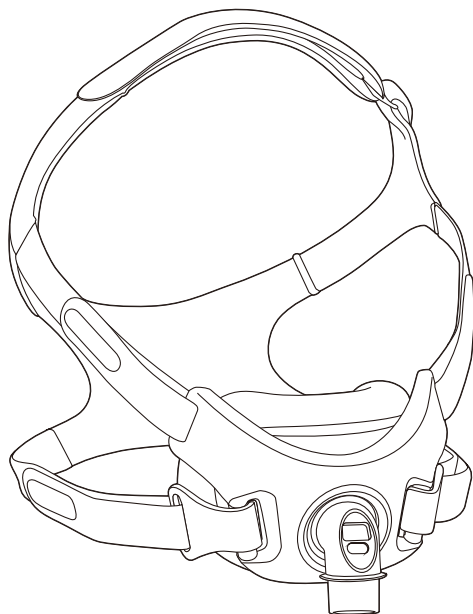

## マスク及び付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお問合せ先までご連絡ください。

マスク装着方法の動画を公開しています

### スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




### パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」➡  
「マスク」へアクセス

## ヘッドギアとマスクの名称

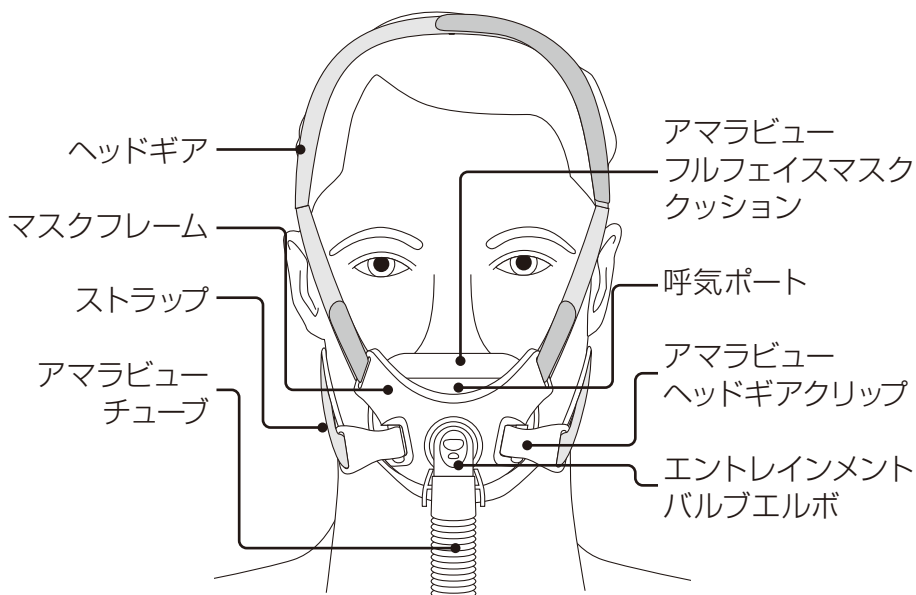


### 正しい装着図

\*呼気ポート及びエントレインメントバルブエルボは塞がないでください。


## 1 マスク装着の手順 (1)

左右どちらかのヘッドギアクリップをフレームから外します。  
ヘッドギアのストラップは最大までゆるめておきます。

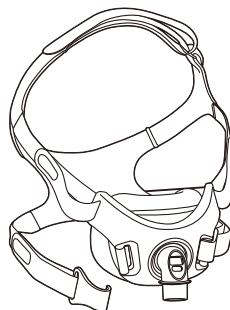


# マスク装着の手順 (2)


マスククッションを顔にあてクッション上部が鼻孔の下にあたるように支えながらヘッドギアをかぶります。ヘッドギアクリップの片方をもとの位置に取り付けます。

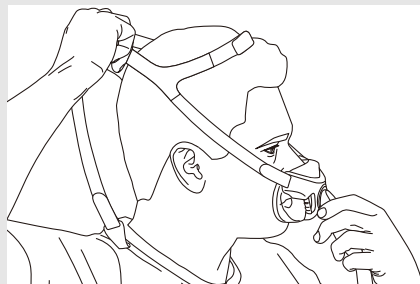

※ 鼻孔にあたる部分が鼻の上を覆わないように注意してください。

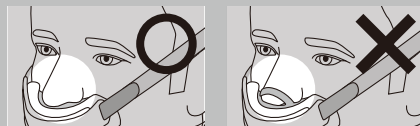


ヘッドギア上部ストラップ、下部ストラップ、トップストラップを均等に、締めすぎないように注意しながら調整します。

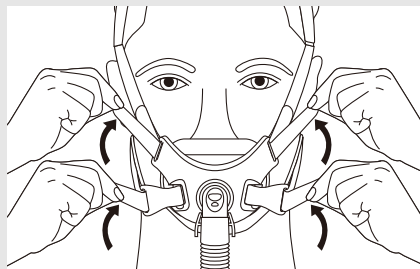

**マスクを取り外す際は…**



クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ち上げながら取り外さないでください。

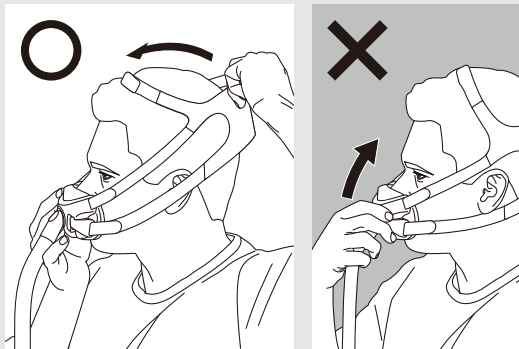


**マスクが頬に食い込んでいる場合**


ヘッドギアを締めすぎていませんか？  
特に下部のヘッドギアは頬との間に  
指が1本入る程度に緩めてください。

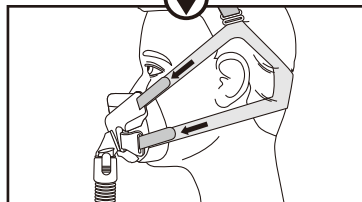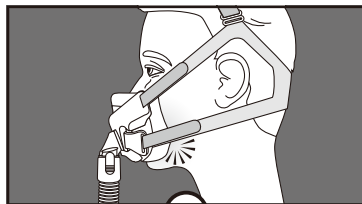**空気が漏れる場合**


鼻周辺から空気が漏れる場合は上部  
ストラップを調整してください。

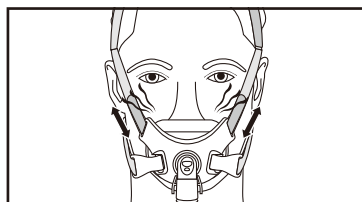


左右の口周辺から空気が漏れる場合は  
下部ストラップを調整してください。

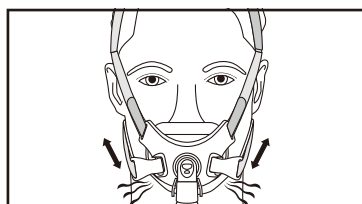**ストラップが耳／目に近すぎる場合**



上部ストラップが耳にかかる場合は、  
トップストラップを調整し、ヘッドギア  
を引き上げてください。

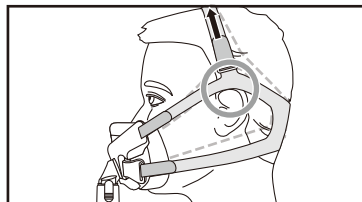

上部ストラップが目にかかる場合は、  
トップストラップを調整し、ヘッドギア  
を引き下げてください。

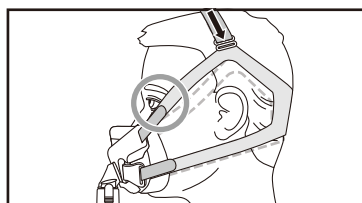





### 3 マスクの分解／組み立て

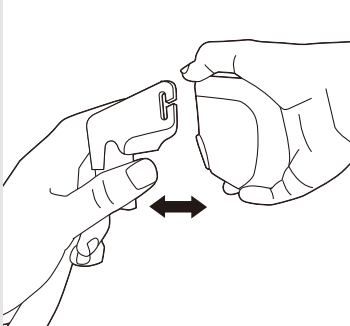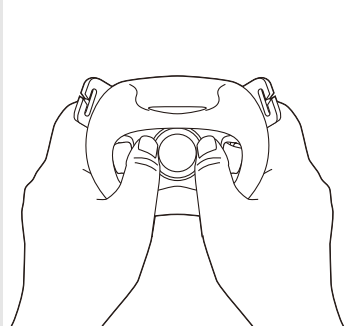部品名	分解	組み立て
ヘッドギア	<p>マスクフレームをヘッドギアクリップから取り外します。</p>	<p>上部ストラップをマスクフレームのスロットに通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通します。</p>
マスククッション	<p>マスクフレームから取り外します。</p> 	<p>クッションをカチッと音になるまで親指で押し込みます。</p> 

## 4

## 付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

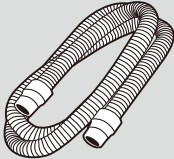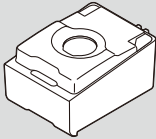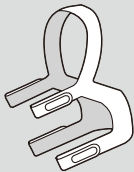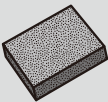頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p> <p>※Trilogyシリーズを除く</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして手洗いします。</p>
2週間	 花粉フィルタ(灰色)	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当たりの良い場所で干さない。

# フィルタの取り付け方法

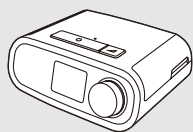

ドリーム  
ステーション

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

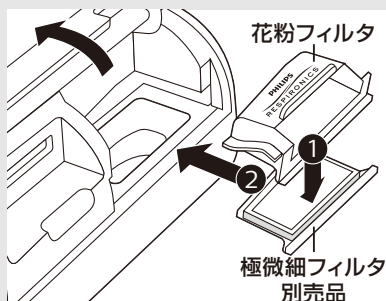

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを  
読み取り動画へアクセス



パソコンから



フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→  
「Dream Family」へアクセス

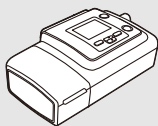


BiPAP A40システム  
シルバーシリーズ

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

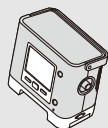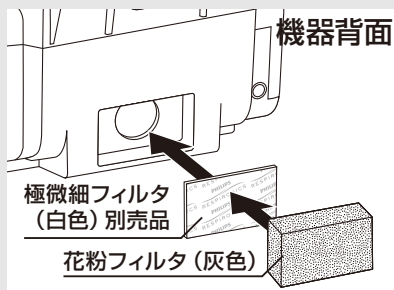

トリロジーplus  
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図のようにセットします。

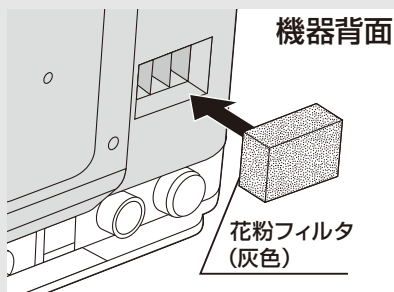



## CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこぎゅう

# 0120-48-4159

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

販売名:アマラビュー フルフェイスマスク  
医療機器届出番号:11B1X00022000069 一般医療機器  
販売名:アマラビュー SE フルフェイスマスク  
医療機器届出番号:11B1X00022000106 一般医療機器

## 人工呼吸器をお使いの方

昼間 地域営業所・出張所・駐在

受付時間 平日9:00~17:30

夜間休日 機器安全センター

# 0120-633-811

受付時間 平日17:30~翌9:00  
土・日・祝祭日

- フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**  
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで  
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています  
[www.philips.co.jp/PRJ-Office](http://www.philips.co.jp/PRJ-Office)

© 2016 Philips Respironics GK  
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。  
PN 1127418/190220 R6-PDF