


# PHILIPS

## マスク

# ウィスプ ネーザルマスク Wisp Mask

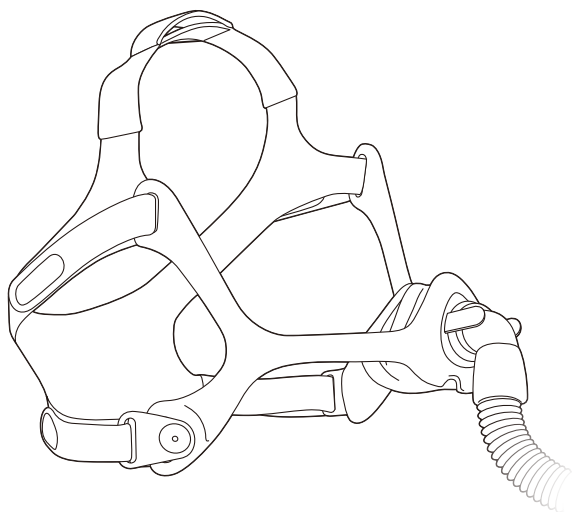

## マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問合せください。

マスク装着方法の動画を公開しています

### スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




### パソコンから

[フィリップス・レスピロニクス](#)

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」➡  
「マスク」へアクセス

## ヘッドギアとマスクの名称

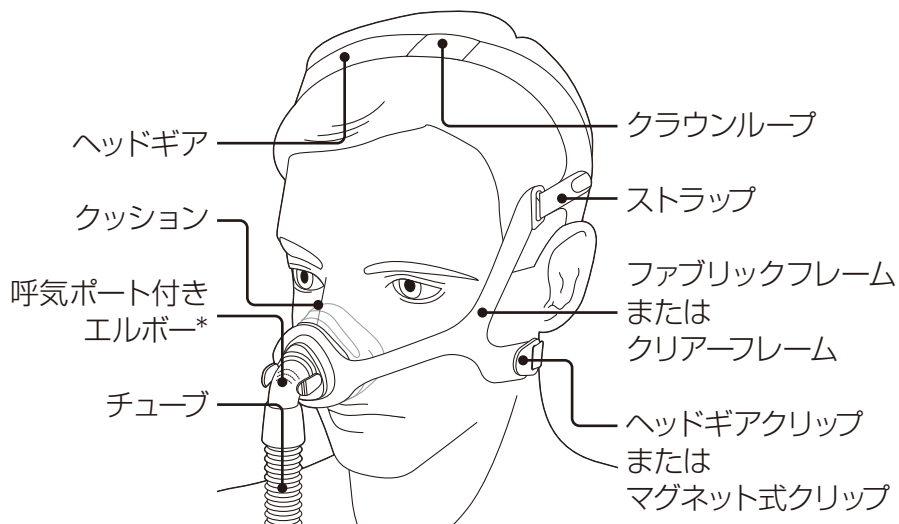


正しい装着図

\*塞がないこと

## 1 マスク装着の手順 (1)


ヘッドギアのクリップを片方はずします。

次にクッションを鼻にあてたまま、ヘッドギアを装着します。

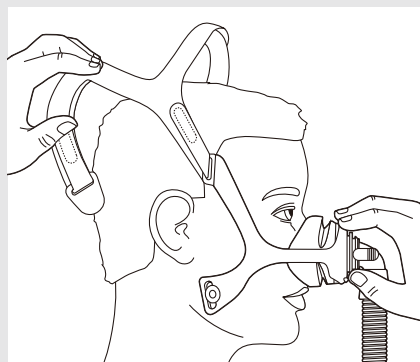

# マスク装着の手順（2）

ヘッドギアの下部にクリップを再装着します。

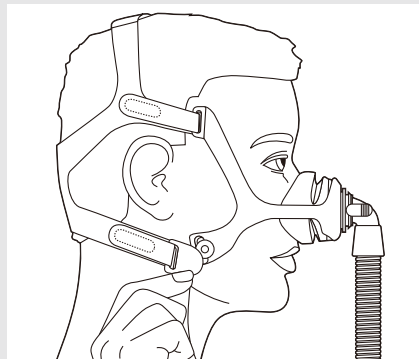


上部ストラップと下部ストラップを左右均等に締めすぎないように注意しつつ調整します。





マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。


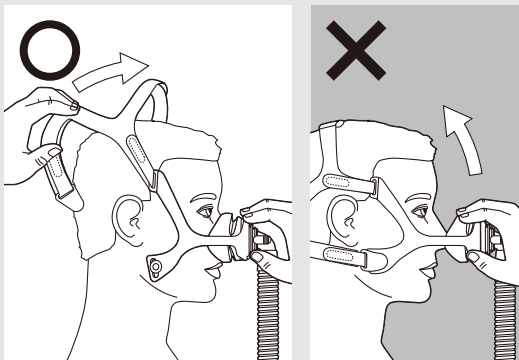


**マスクが頬に食い込んでいる場合**



ヘッドギアを締めすぎていませんか？  
特に下部のヘッドギアは頬との間に  
指が1本入る程度に緩めます。

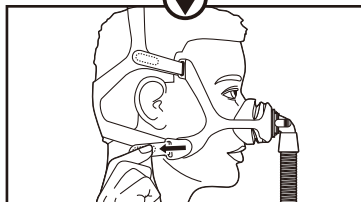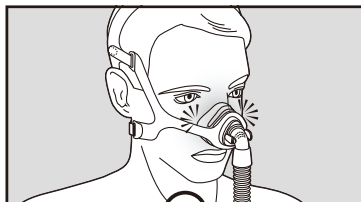**目の周辺に空気漏れがある場合**





マスクが顔と平行になっていませんか？  
ヘッドギアが顔を圧迫しないところで  
留めなおします。

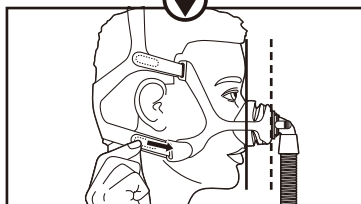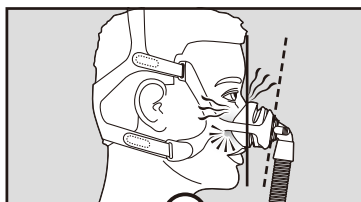**口元の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？  
ヘッドギアが顔を圧迫しないところで  
留めなおします。

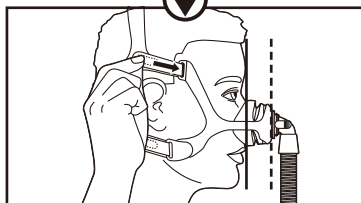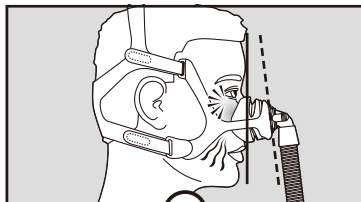

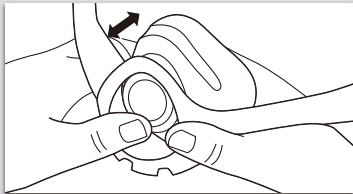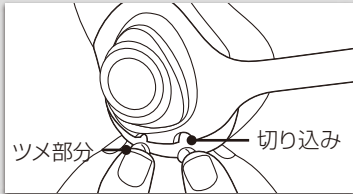
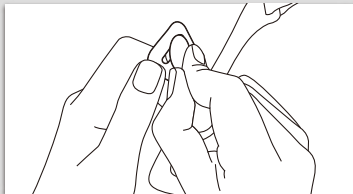
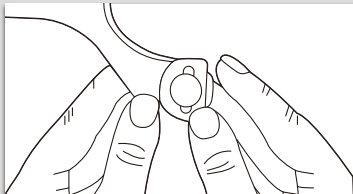


### 3 マスクの分解／組み立て

部品名	分解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアのストラップ部分をフレームから取り外します。	ヘッドギアのストラップをスロット、クリップに通して取り付けます。
チューブ	クイックリリースタブを両側から押さえて引き離し、フレームからチューブを取り外します。	クイックリリースタブを両側から押さえながら接続口に取り付けます。
マスククッション	マスクフレームから取り外します。 	クッションのツメ部分をフレームの切り込みに合わせてはめ込みます。 
マグネット式クリップ	クリップを外し、丸い部分をフレームから押し出します。 	丸いパーツの突起をフレームに押し込み、クリップをヘッドギアのストラップに取り付けます。 

## 4

## 付属品のお手入れ方法

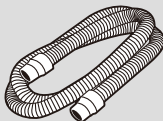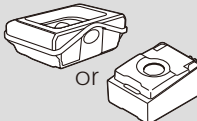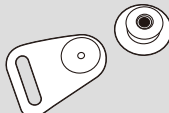(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 水タンク	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	 マグネット式クリップ	クリップはすすいだあと水分を拭き取ってください
1週間	 ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗います。
2週間	 花粉フィルタ	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

# フィルタの取り付け方法

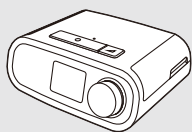

ドリーム  
ステーション

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

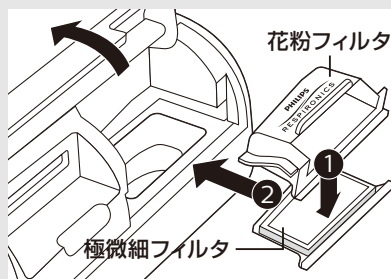

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

### スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを  
読み取り動画へアクセス



### パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→  
「Dream Family」へアクセス

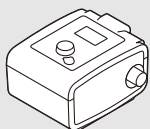

System One  
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

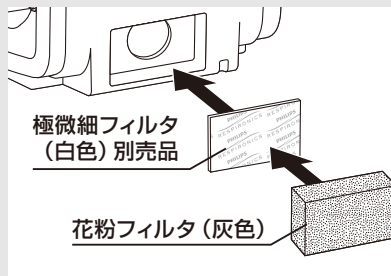

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

### スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを  
読み取り動画へアクセス



### パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→  
「CPAP・睡眠検査装置」へアクセス

## マグネットクリップについてご注意ください

- 動作中の医療機器（特にペースメーカー、除細動器、人工内耳などの植込型機器）、ニッケル・鉄などの磁性金属から5cm以上離して使用してください。
- 磁気共鳴画像（MRI）装置の内部または近くでは使用しないでください。



フィリップス・レスピロニクス合同会社  
**CPAPお客様コールセンター**

よるは よいこきゅう

**0120-48-4159**

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

販売名: ウィスブ ネーザルマスク  
医療機器届出番号: 11B1X00022000060  
一般医療機器

- フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**  
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで  
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています  
[www.philips.co.jp/PRJ-Office](http://www.philips.co.jp/PRJ-Office)

© 2017 Philips Respironics GK  
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。  
PN 1110450/190220 R12-FK

