

HS1 用 M5072A 小児用 SMART パッド・カートリッジ交換手順書

(販売名：未就学児用 SMART パッド・カートリッジ／製造販売届出番号：13B1X00221000049)

以下の手順に従って、お手持ちのパッドとの交換作業にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、対策品受領後 4 週間を目途に、別紙「返送手順書」に従って「回収対象パッド」および「回収完了確認書」を弊社宛にお送りいただきますようお願い申し上げます。
これらの手順については右の QR コードからもご確認ください。




1. 「回収完了確認書」「回収対象ロット番号一覧表」「対策品パッド発送明細 (M5072A 小児用)」および所有されている AED ハートスタート HS1 (以下、AED 本体) を、お手元にご用意ください。AED は赤いキャリングケースに入っています。



2. キャリングケースから AED 本体を取出して製造番号をご確認ください。製造番号は本体底面の以下の赤矢印で示した場所に印字されているアルファベットで始まる英数字です。



3. 手順 2 でご確認いただいた AED 本体の製造番号が同封されている「対策品パッド発送明細 (M5072A 小児用)」上に記載されていることをご確認ください。
4. 予備の小児用 SMART パッド・カートリッジを保管されている場合はお手元にご用意ください。小児用 SMART パッド・カートリッジは以下に示した水色のパッケージに入っている、または子供の絵が描かれている製品です。多くの場合、AED 本体には成人用 SMART パッド・カートリッジが装着されており、小児用 SMART パッド・カートリッジは、キャリングケース内側の上蓋内側に入っているか、ご施設様によっては他の場所に保管されている場合もございますので、AED 管理担当者様にご確認ください。なお、既に使用された場合には、予備がない場合もございます。

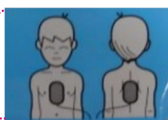

5. AED 本体に装着されている小児用 SMART パッド・カートリッジ、予備の小児用 SMART パッド・カートリッジが回収対象製品であることをご確認ください。小児用 SMART パッド・カートリッジのロット番号は、裏面の図に赤矢印で示した場所に印字されている Y から始まる番号です。回収対象製品のロット番号は、同封しております「回収対象ロット番号一覧表」上でご確認くださいことができます。


【お願い】

「回収対象ロット番号一覧表」に記載されている対象ロット製品のみ限定してご返却いただきますようお願いいたします。誤って対象外の製品をご返却いただいた場合、製品品質が担保できないことからお返しすることができません。弊社にて廃棄処分させていただきますので予めご了承ください。

※注：使用期限切れの M5072A 小児用は回収対象外ですので販売店にご注文ください。
【ロット番号記載位置】回収対象品のロット番号はアルファベットの Y から始まる番号です。



6. 小児用 SMART パッド・カートリッジが AED 本体に装着されている場合は、本体上部にあるラッチを横にスライドして小児用 SMART パッド・カートリッジを持ち上げて取り外してください。

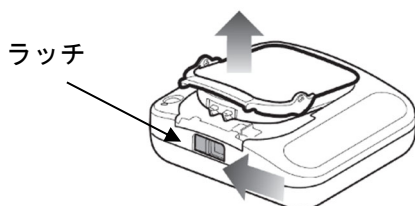

以下の QR コードから交換手順をご確認いただけます。



本体上部にあるラッチを横にスライド

7. お届けした小児用 SMART パッド・カートリッジをお手元にご用意ください。手順 2 でご確認いただいた製造番号の AED 本体に、お届けした小児用 SMART パッド・カートリッジを装着、および／またはその予備として保管してください。新しい小児用 SMART パッド・カートリッジをパッケージから取り出し、カートリッジを AED 本体前面のスロットに取り付けます。確実に収まるとその手ごたえがございます。緑の「PULL (引く)」ハンドルは必ず下げておいてください。



8. 「対策品パッド発送明細 (M5072A 小児用)」上に記載されているすべての AED 本体について、上記の手順を行ってください。すべての交換が終了しましたら、回収対象の小児用 SMART パッド・カートリッジ数量のご確認をお願いいたします。尚、ご施設の運用に合わせてパッドの配置を変更されている場合には、実際の状況に合わせて交換をお願いいたします。
9. 「回収完了確認書」の記入例を参照いただき、手順 8 でご確認いただいた数量、ならびに必要事項を「回収完了確認書」にご記入をお願いいたします。「回収完了確認書」は「成人用」、「小児用」で異なりますので、それぞれの「回収完了確認書」にご記入をお願いします。
10. 「返却手順書」でご案内している手順に沿って、手順 9 でご確認いただいたすべての回収対象の小児用 SMART パッド・カートリッジ、ならびに「回収完了確認書」を弊社宛にお送りいただきますようお願いいたします。なお、返送用段ボール箱は「成人用」、「小児用」で異なりますので、それぞれの「返送用段ボール」を使用して返送をお願いいたします。

本件に関しましてご不明な点等がございましたら、フィリップス AED (HS1用) パッド回収事務局 TEL 0120-143-079 (受付/平日9:00-17:30) までお問合せ下さい。