

安全使用ガイド

フィリップス社製SMARTパッドカートリッジ
 (成人用:M5071A、小児用:M5072A)
 ご使用時に注意ください

パターン	ゲルが剥離している箇所		
写真 (サンプル)	図 1	図 2	図 3
写真 (サンプル)			
事象	剥離して折りたたまれたゲル。	剥離して折り畳まれたゲルは、変色や溶けたように見えることもあります。	台紙からゲルの大半が剥離した状態。
対処法	<p>ためらわず傷病者にパッドを貼ってください。</p> <p>※ AED の音声ガイダンスに従ってご使用ください。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 予備SMARTパッドカートリッジに交換ください。 予備が無い場合は、心肺蘇生を継続してください。

- ご使用の際に、台紙からパッドを剥がすときにゲルが部分的に剥離していることにお気づきになりましたら、可能な限りゲル自体が折りたたまれないようにお願いいたします。
- SMARTパッドカートリッジのフィルムシールを破るとパッドがすぐに乾いてしまいますので、フィルムシールは、緊急時に傷病者に使用する場合にのみ開封するようお願いいたします。
- 可能な限り予備のSMARTパッドカートリッジを確保してください。

本件に関しましてご不明な点などがございましたら、TEL 0120-556-857までお問い合わせください。
なお、緊急時に傷病者に使用する際のお問い合わせには対応できません。

こちらのガイドは、裏面の同梱方法に従ってキャリングケースに入れるようにしてください。

※JRC蘇生ガイドライン2020に従い以下の通り読み替えてください。
 「成人用」⇒「小学生～大人用」
 「小児用」⇒「未就学児用」

同梱方法

こちらの「安全使用ガイド」は、緊急時に使用者様が確認いただけるようにキャリングケース内側のクリアポケットに入れるようにしてください。

以下写真のとおり「**安全使用ガイド**」が表に見えるように二つ折りにして入れていただきますようお願いいたします。

