

PHILIPS

Healthcare

Lumify

Lumify

ネットワーク接続マニュアル



はじめに

ネットワーク接続の手順は、ご使用のタブレット機種やOSバージョンにより操作が異なる可能性があります。詳細はタブレットの取扱説明書をご参照ください。また、Wi-Fiアンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。ご使用のタブレットのWi-Fiアンテナの場所をご確認ください。

1. Wi-FiのON/OFF設定

1. タブレットの電源をいれます
2. [ドローアイコン]  をタップします
3. [設定]  をタップします
4. [ネットワークとインターネット]  をタップします
5. [Wi-Fi]をタップします
6. スイッチ  をタップしてON/OFFを切り替えます

*[Wi-Fi設定]で、[Wi-Fiを自動的にONにする]のスイッチをONにすると保存済のネットワークを検出したときに自動でONになります




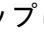

2. Wi-Fiアクセスポイントに接続

1. 接続するネットワーク名をタップします
*接続するネットワークが表示されていない場合、手動で追加することができます
2. セキュリティで保護されたネットワークに接続する場合、パスワードを入力します
3. [接続]をタップします

3. ネットワークの追加

1. [ネットワークの追加]をタップします
2. ネットワーク名 (SSID) を入力します
3. 必要に応じて、ネットワークのセキュリティタイプを選択し、パスワードを入力します
4. [保存]をタップします

4. 有線LAN接続

1. [ドローワーアイコン]  をタップします
2. [設定]  をタップします
3. [ネットワークとインターネット]  をタップします
4. [Ethernet]  をタップします
5. スイッチ  をタップしてON/OFFを切り替えます
6. [Ethernet設定を変更]をタップし、[詳細オプションを表示]にチェックします
7. 必要事項を入力後、[保存]をタップします

6 詳細オプションを表示

プロキシ
なし ▼

IP設定
静的 ▼

IPアドレス
192.168.1.128



ゲートウェイ
192.168.1.1


ネットワークプレフィックス長
24

DNS 1

キャンセル 保存 **7**

5. DICOM接続

1. [Lumify]アプリケーションを起動します
2. [メニュー]  (画面左上) から、[Export Destinations]  をタップします
3. [+Add New] (画面右上) をタップします
4. [Add New Destination] が表示されます
[Destination Nickname]に、保存先の名称 (例: Storage) を入力します
5. Destination Type : [DICOM]を選択します
6. [Continue]をタップします

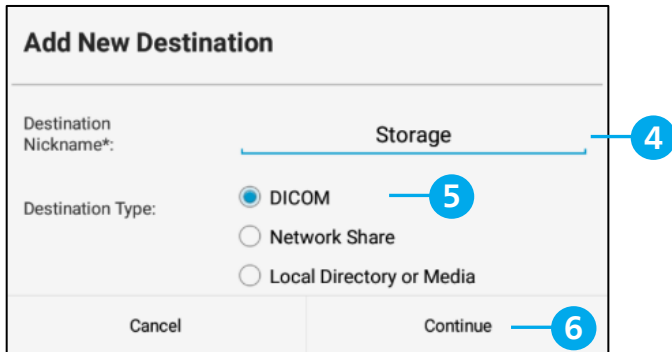

Add New Destination

Destination Nickname*:

Destination Type:


DICOM

Network Share

Local Directory or Media

Cancel Continue

7. [AE Title]、[IP Address]、[Port]を入力します
8. [Export Format]を選択します
 - ・ RLE (Lossless) : 非圧縮
 - ・ JPEG (Lossy) : 圧縮
9. 接続テストをする場合、[Test]をタップします
*接続が完了すると、[Test Passed]のメッセージが表示されます
10. [Save]をタップします

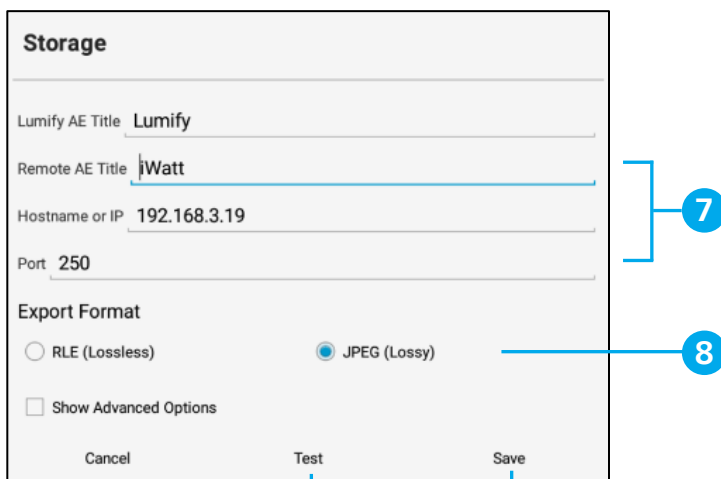

Storage

Lumify AE Title

Remote AE Title

Hostname or IP

Port

Export Format

RLE (Lossless) JPEG (Lossy)

Show Advanced Options



Cancel Test Save




Test Passed

 Server Connected.

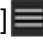


6. モダリティ・ワークリスト (MWL) 接続

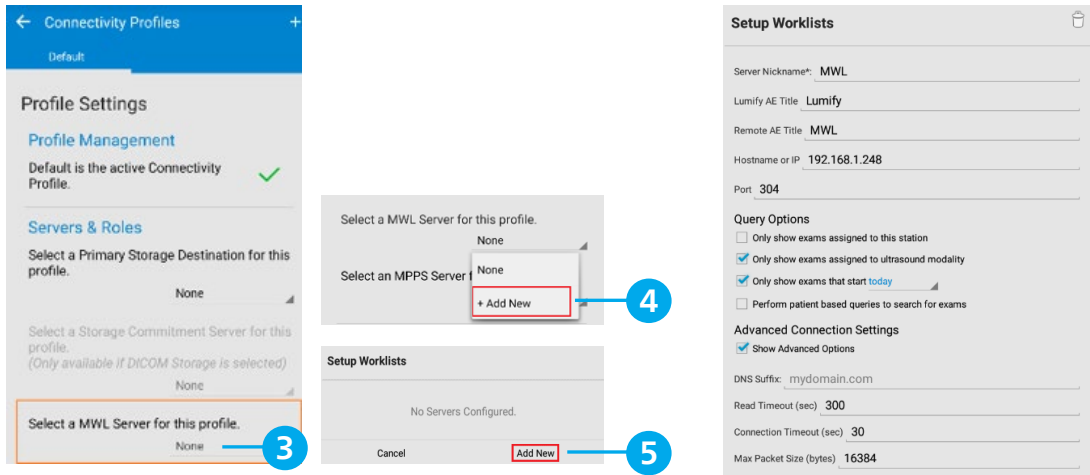1. [メニュー]  (画面左上) から、[Connectivity Profiles]  をタップします
2. [Profile Settings] > [Servers & Roles] > [Select a MWL Server for this profile]
3. [None]をタップします
4. [+ Add New]をタップします
5. [Setup Worklists]が表示されます
*新規登録をする場合、[Add New]をタップします
6. MWL接続に必要な設定項目を入力します



7. 接続テストを行う場合、[Test]をタップします
*接続が完了すると、[Success!]のメッセージが表示されます
8. 設定を終了する場合、[Save]をタップします

7. MWLからの患者情報取得

1. [メニュー]  (画面左上) から、[Add Patient]  をタップします
2. [Patient Info]画面の右上に表示される、[QUERY MWL]  をタップします
3. クエリを実行するMWLサーバーを選択します
4. 必要に応じて検索条件を入力し、[Search]をタップします
5. [Query Results]に患者情報が表示されます





製造販売業者
株式会社フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

お客様窓口 0120-556-494
03-3740-3213

受付時間 9：00～18：00（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

www.Philips.co.jp/healthcare

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名：超音波画像診断装置 Lumify
医療機器認証番号：302AFBZX00043000
管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

© 2021 Philips Japan, Ltd.