

PHILIPS

Healthcare

Lumify

Lumify

電子メールでのデータ送信





はじめに


電子メールで患者データを送信する場合、初回のみ設定が必要です。送信されるデータは、個人情報（患者名、MRNなど）が消去された状態で送信されます。

電子メールによるデータ転送


1. タブレットの電源を入れます
2. [Lumify]アプリケーションを起動します
3. [メニュー]  (画面左上) から、[Saved Exam]  をタップします
4. メール転送する検査をタップすると、[Review]に検査が表示されます
5. 検査の画像を全て送信する場合：[Export Exam]  をタップします
6. 検査画像の一部を選択して送信する場合：
サムネイル画像を長押しし、[Export Selected]  をタップします
*選択された画像は黄色枠で表示されます
7. [Email]をタップします
[Notice] (プライバシー通知メッセージ)を確認し、[Continue]をタップします

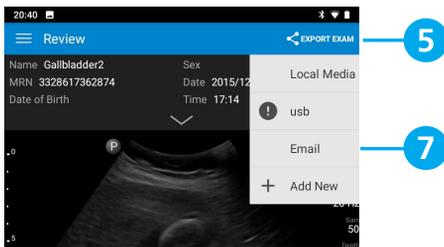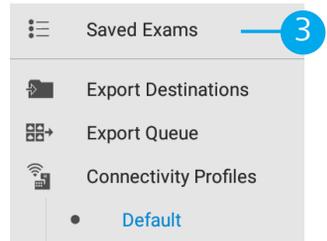

8. [Pick an Email Application to Use]が表示されたら、[Always]をタップします
*設定する電子メールをデフォルトとして設定します
9. [Gmailへようこそ]と表示されたら、[スキップ] (画面左下) をタップします
10. [+メールアドレスの追加]をタップします

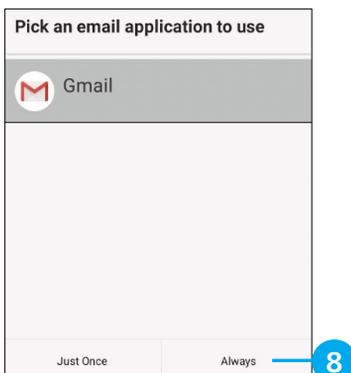

11. [メールのセットアップ]で、使用している電子メールの設定、ログインを行います

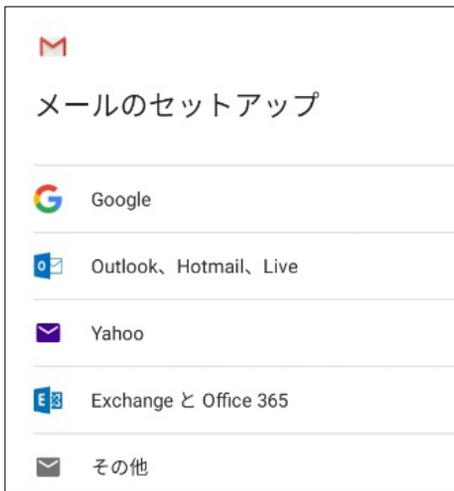


対応するアプリケーションでメールアドレスをお持ちでない場合は、メールアドレスの作成が必要です

12. 使用するメールアドレスをタップします

13. 送信先のメールアドレスを、[To]へ入力して送信します



すべてのメールアドレスを追加できるようになりました。詳細

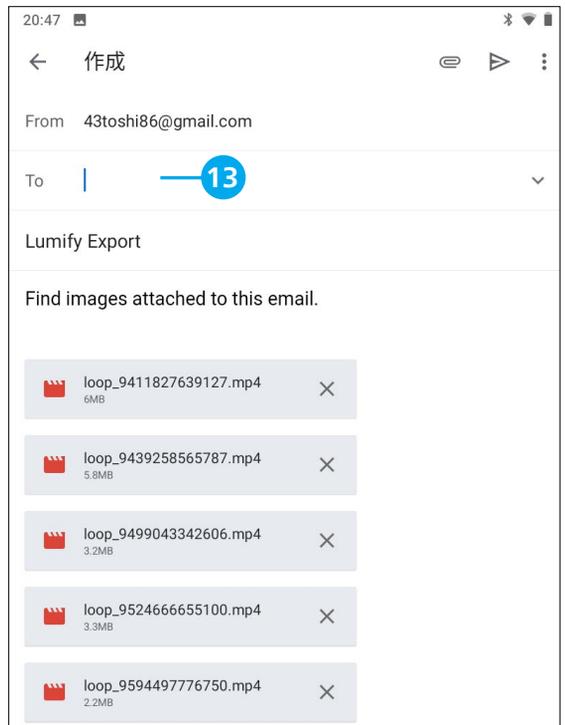



製造販売業者
株式会社フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

お客様窓口 0120-556-494
03-3740-3213

受付時間 9：00～18：00（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

www.Philips.co.jp/healthcare

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「お客様窓口」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

販売名：超音波画像診断装置 Lumify
医療機器認証番号：302AFBZX00043000
管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

© 2021 Philips Japan, Ltd.