

Üzemeltetési megjegyzések

Lumify diagnosztikai ultrahangrendszer
2023. május 20.



4535 621 67741 Rev A




Az üzemeltetési megjegyzésekről

Az üzemeltetési megjegyzések olyan információkat tartalmaznak, amelyek egyértelművé teszik a rendszer bizonyos félreérthető vagy a felhasználót esetlegesen összezavaró válaszreakcióit. Olvassa át az üzemeltetési megjegyzéseket, és tartson belőlük egy példányt a rendszerkézikönyvekkel együtt. Ha megoldható, helyezze az üzemeltetési megjegyzéseket az ultrahangrendszer mellé.

Címkével kapcsolatos információk

Őrizze meg a kapott *Gyors útmutatót*, mivel az tartalmazza a Lumify diagnosztikai ultrahangrendszer címkézésével kapcsolatos információt.

A rendszer használata

- (Csak androidos eszközök esetén) PW Doppler módban a vizsgálat gyors kimerevítése és feloldása miatt az audio működése leállhat. A PW Doppler módból való kilépés, majd ismételt belépés néha megszünteti a problémát.
- (Csak androidos eszközök esetén) Ha az eszközt 2D módból PW Doppler módba való áttérés közben elforgatja, a szoftver működése leállhat.
- (Csak androidos eszközök esetén) A pásztázási sebesség beállításának módosítása esetén előfordulhat, hogy a követés skálázása nem megfelelően történik.
- (Csak androidos eszközök esetén) A PW Doppler mód fekvő tájolású teljes képernyős nézetében a kilépő teljes képernyős kép  vezérlője takarja az invertáló követő  vezérlőjét, de az invertáló követő aktiválási területének vezérlője felül marad. Amikor a teljes képernyős nézetből való kilépéshez megérinti a vezérlőt, a követő invertál.
- (Csak androidos eszközök esetén) PW Doppler módban a 2D kép torzulhat, ha a spektrális nyomvonalra kapcsolást követően módosítja a **Depth**  kezelőszervet, majd visszakapcsol a 2D képre.
- A **Fast Flow** és **Slow Flow** vezérlő színes üzemmódban kissé átfedésben lehet egymással. Ez leggyakrabban 5. generációs iPad-mobileszközökön jelentkezik, fekvő elrendezésnél. Ez nem befolyásolja a vezérlők működését.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor a **Patient Info** úrlapon kézzel javítja a beteg **Date of Birth** mezőjének adatait, mind a négy számjegy törlése és ismételt beírása hibát eredményez. A lehető legjobb eredmény érdekében adja meg újból a teljes dátumot.
- (Csak iOS eszközökön) A navigációs sáv a **Back** vezérlővel együtt hiányzik a **Contact Information** úrlapról (elérhető a **Settings** menü **Customer Information** lapjáról). A lap elhagyásához adja meg az ügyféladatokat, majd érintse meg a **Continue** lehetőséget.
- Csak iOS eszközökön) Ha kilép a Lumify alkalmazásból, vagy ha hagyja a mobileszközt alvó üzemmódba lépni, a Lumify áramellátási modulja (LPM) alvó üzemmódba léphet. Ha megpróbál visszatérni a pásztázáshoz, miközben az LPM alvó üzemmódban van, csatlakozási hibaüzenet jelenik meg. Az LPM felébresztéséhez nyomja meg az LPM hátulján található gombot.

Reacts alkalmazásával (csak androidos eszközökre)

Egy másik Lumify eszközről érkező Reacts-hívás fogadása esetén a Lumify szoftvere váratlanul leállhat. Annak érdekében, hogy ez a probléma minél kevesebbszer forduljon elő, még a Reacts-hívás fogadása előtt engedélyezze a fogadó eszközön a kamera- és mikrofon-hozzáférést a Lumify alkalmazás számára.

Áttekintés


- Exportált képsorozatok Windows operációs rendszerű számítógépen Media Player segítségével történő lejátszása esetén a lejátszás szakadozott lehet. A probléma elkerülése érdekében használjon másik médialejátszót.
- (Csak androidos eszközök esetén) Az eszköz forgatása miatt a jelölések eltűnhetnek.
- (Csak androidos eszközök esetén) M-módban vagy PW Doppler módban teljes képernyős nézetre történő váltáskor a jelölések helyzete megváltozhat.
- (Csak androidos eszközök esetén) Az M-módban vagy PW Doppler módban készült jelölések helyzete áttekintő üzemmódban megváltozhat.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor egy mentett vizsgálatokat tartalmazó, hosszú lista aljára görget, előfordulhat, hogy a listában szereplő utolsó vizsgálat nem látszik a képernyő szélén.
- (Csak iOS eszközökön) Amikor vizsgálatokat, képeket vagy képsorozatokot exportál, akkor a helyes működés és adatátvitel biztosítása érdekében aktív állapotban kell tartania a Lumify rendszert a háttérben, amíg az exportálás be nem fejeződik.

A rendszer karbantartása

(Csak iOS eszközök esetén) Előfordul, hogy az iPad mini 5 mobileszköz nem tud tölteni, amikor a Lumify áramellátási modulhoz (LPM) van csatlakoztatva. Az LPM és az iPad mini 5 mobileszköz teljes feltöltése érdekében töltsön külön az eszközöket.

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.
Kiadva az Amerikai Egyesült Államokban
A szerzői jog birtokosának előzetes írásos beleegyezése nélkül a sokszorosítás és az átadás sem részben, sem egészben nem engedélyezett semmilyen formában vagy módon, beleértve az elektronikus, mechanikai vagy egyéb lehetséges módokat is.

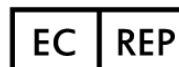

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

