

PHILIPS

DreamStation 2

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced


Patient

Guide de démarrage rapide



Commencer le traitement

Pour commencer le traitement, appuyez sur le **bouton On/Off**.
Un **cercle bleu** indique que le traitement est en cours.

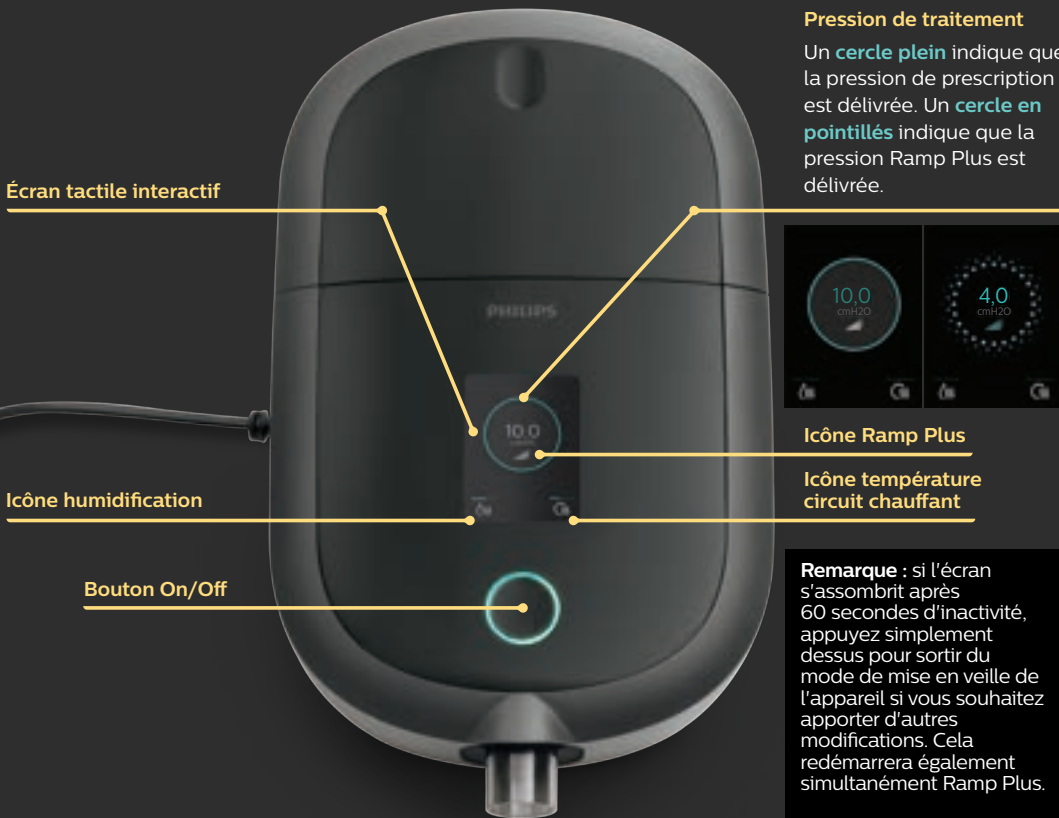

Personnaliser vos réglages

Ramp Plus

La fonctionnalité **Ramp Plus** vous permet de définir une pression de départ confortable pour vous endormir.

1. Appuyez sur l'icône **Ramp Plus** pour afficher et modifier votre pression **Ramp Plus**.
2. Appuyez sur le **symbole +** ou **-** jusqu'à ce que vous atteigniez un réglage confortable. Les réglages **Ramp Plus** peuvent être désactivés ou définis entre 4 et 10 cm H₂O.
3. Appuyez sur « **Confirmer** » pour enregistrer le réglage.


Une fois **Ramp Plus** configuré, le réglage est enregistré et s'active automatiquement pour les sessions de thérapie ultérieures, sans que vous ayez à appuyer de nouveau sur l'icône **Ramp Plus**.



Humidification (le cas échéant)

1. Appuyez sur l'icône **humidification** pour afficher le réglage actuel.
2. Appuyez à nouveau sur l'icône jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau d'humidité choisi. L'humidification peut être désactivée ou réglée de 1 (minimum) à 5 (maximum).


Une fois l'**humidification** réglée, le niveau est enregistré et automatiquement activé pour les sessions de traitement ultérieures.

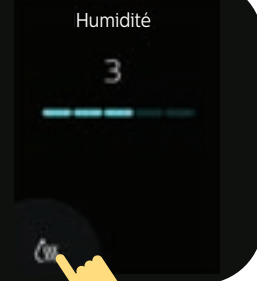

Température du circuit chauffant (le cas échéant)

1. Appuyez sur l'icône **Circuit chauffant** pour afficher le réglage actuel de la température.
2. Appuyez sur l'icône jusqu'à ce que vous atteigniez la température choisie. Le circuit chauffant peut être désactivé ou réglé de 1 (minimum) à 5 (maximum).

Une fois la **température** réglée, elle est enregistrée et automatiquement activée pour les sessions de traitement ultérieures.

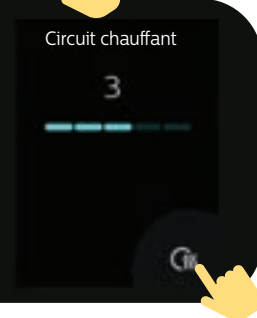

Synthèse des données thérapeutiques

Pour arrêter le débit d'air, appuyez sur le **bouton On/Off**. La synthèse de vos données thérapeutiques s'affiche à l'écran. L'accès à certaines informations dépendra des réglages de votre prestataire.

Écran Dernière session

Les informations en **bleu** indiquent les informations que vous pouvez développer en appuyant dessus ou auxquelles vous pouvez apporter des modifications.

Dernière session

Heures thérapie **0:00**

IAH **0,0**

Ajust. Masque **Correct**

Réglages

1

L'écran **Heures thérapie** affiche la durée du traitement en heures et minutes au cours de vos 3 dernières sessions.

< Retour

Heures thérapie

Voici vos heures totales d'utilisation pour les 3 derniers jours.

0:00

Il y a 2 jours

0:00

Il y a 1 jour

0:00

Dernière session

2

L'écran IAH affiche la valeur de l'indice d'apnée-hypopnée (IAH) pour la période de 24 heures la plus récente (si la fonctionnalité est activée par votre fournisseur).

[← Retour](#)

IAH

Cet indice représente le nombre d'événements apnée ou hypopnée par heure de sommeil.

0.0

Dernière session

3

L'écran [Ajust. masque](#) affiche la mise en place de votre masque lors de votre dernière session. Vous pouvez également exécuter un Contrôle du masque. Mettez votre masque et appuyez sur « [Vérifier](#) » pour lancer le Contrôle du masque.

[← Retour](#)

Ajust. Masque

Vous pouvez vérifier l'ajustement de votre masque avant de commencer le traitement.

Correct

Dernière session

[Vérifier](#)

Réglages

Confort, appareil et données

L'accès à certaines informations dépendra des réglages de votre prestataire.

1

Pour modifier les réglages et accéder à des informations supplémentaires, appuyez sur « Réglages ».

Dernière session

Heures thérapie 0:00

IAH 0.0

Ajust. Masque Correct

Réglages

2

Modifiez les **Réglages de confort** disponibles. Les informations en bleu indiquent les informations sur lesquelles vous pouvez appuyer pour apporter des modifications.

- Durée et pression Ramp Plus
- Humidité
- Circuit chauffant (si connecté)
- Taille du circuit
- Confort FLEX

← Retour

Confort

Ramp+ 75 Min, 4.0

Humidité Off

Circuit chauffant Off


FLEX 3

Appareil

3

Faites glisser le doigt vers le haut de l'écran pour afficher des informations supplémentaires sur l'appareil, telles que le réglage du mode avion, la suppression des appairages Bluetooth et la réinitialisation de l'heure ou de la langue.

Appuyez sur les informations en **bleu** pour apporter des modifications. Vous pouvez également afficher le numéro de série et la version du logiciel de l'appareil.

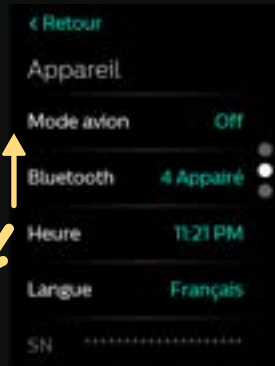

4

Appuyez sur « **Afficher les rapports** » pour sélectionner une période comprise entre deux dates et afficher les synthèses de données thérapeutiques supplémentaires.

Pour quitter l'écran **Réglages** à tout moment, appuyez sur « **Retour** » pour revenir à l'écran **Dernière session**.



Consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des informations de dépannage détaillées.

Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil et ses composants en bon état de fonctionnement, vous devez les nettoyer régulièrement. Ceci est également important pour préserver votre santé.

Réservoir d'eau, joint et couvercle de l'humidificateur

Nettoyer quotidiennement avec de l'eau et une eau savonneuse.



Circuit et adaptateurs

Nettoyez chaque semaine avec de l'eau et une eau savonneuse.



Filtres

Rincer à l'eau le filtre réutilisable gris toutes les deux semaines.

Ne pas rincer le filtre jetable bleu.



Consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur l'entretien et le nettoyage.



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Spécifications sous réserve de modifications sans préavis. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com/respironics



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 États-Unis



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Allemagne



REF 1150691
1150691 R01
ZL 05/07/2021
France-FR