

PHILIPS

DreamStation 2

CPAP

Auto CPAP

Patient

Guide de démarrage rapide




Connexion à DreamMapper

Synchronisez votre appareil avec votre tablette ou votre téléphone portable à l'aide de l'application DreamMapper, disponible dans l'App Store et Google Play.



1

Allumez l'appareil et votre téléphone portable et placez-les à proximité. Lancez la configuration **Bluetooth** et l'appairage dans **DreamMapper**. Suivez les instructions d'appairage qui s'affichent dans **DreamMapper**.

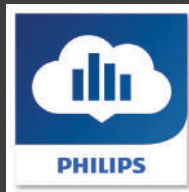

2

Un **code PIN à 6 chiffres** apparaîtra sur l'écran de la DreamStation 2. En fonction de votre téléphone, vous devez soit entrer le **code PIN** dans **DreamMapper** soit cliquer sur le **bouton Thérapie** de l'appareil PPC dans les 30 secondes pour terminer l'appairage.

Cliquer pour appairer
357684
Maintenir pour annuler



3

L'écran affiche « **Appairage de l'appareil** » puis « **Succès : appareil appairé** ».

Bluetooth
Succès
Appareil appairé



Commencer le traitement

Pour commencer le traitement, appuyez sur le **bouton Thérapie**.
Un **cercle bleu** indique que le traitement est en cours.



Personnaliser vos réglages

Ramp Plus

Ramp Plus vous permet de définir une pression de départ confortable pour vous endormir.

Appuyez sur l'icône pour afficher et modifier votre pression **Ramp Plus** jusqu'à ce que vous atteigniez un réglage confortable :

Faible = 4 cm H₂O

Moyenne = 6 cm H₂O

Élevée = 8 cm H₂O

Max = 10 cm H₂O

Off = pression prescrite

Une fois **Ramp Plus** configuré, le réglage est enregistré et s'active automatiquement pour les sessions de traitement ultérieures. Pour réactiver **Ramp Plus** au cours de la même session de traitement, appuyez simplement sur l'icône à tout moment.

Ramp+
Moyenne



Humidification

Humidification vous permet d'ajuster l'humidité à un niveau confortable.

Appuyez sur l'icône pour afficher et modifier votre réglage **humidification** jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau d'humidité choisi :

Faible

Moyenne

Élevée

Off

Une fois l'**humidification** réglée, le niveau est enregistré et automatiquement activé pour les sessions de traitement ultérieures.

Humidité
Faible



Synthèse des données thérapeutiques

Pour arrêter le débit d'air, appuyez sur le **bouton On/Off**. Plusieurs écrans de données de synthèse défilent sur l'écran de votre appareil. Les écrans affichés peuvent varier.

1

L'écran **Heures thérapie** affiche la durée du traitement en heures et minutes au cours de votre dernière session.

Dernière session

0h00

Heures thérapie

2

L'écran **Ajust. masque** affiche la mise en place de votre masque lors de votre dernière session.

Dernière session

Correct

Ajust. masque

3

L'écran IAH affiche la valeur de l'indice d'apnée-hypopnée (IAH) pour la période de 24 heures la plus récente (si la fonctionnalité est activée par votre fournisseur).

Dernière session

0,0
IAH

Menu spécial

Réinitialiser la langue et l'heure, effacer les appairages Bluetooth et modifier le mode avion.

Consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des informations de dépannage détaillées.

1

Pour accéder au menu spécial, appuyez longuement sur les parties droite et gauche de l'écran lorsque la thérapie est désactivée, jusqu'à ce que « **Réinitialisation réglages** » s'affiche.

Suivez les instructions à l'écran et parcourez chaque réglage pour terminer les réglages et quitter le menu spécial.

Remarque : après une minute d'inactivité, l'appareil revient à l'écran **Thérapie désactivée**.



Démarrer traitement

Cliquez ci-dessous



2

Maintenez enfoncé le **bouton On/Off** pour réinitialiser les **réglages Langue** et **Heure**. Ou cliquez sur le **bouton On/Off** pour annuler et passer à l'option suivante.

Mise à zero

Langue

Heure

Mise à zero

Maintenir pr démarrer

Cliquer pour annuler



3

Maintenez enfoncé le **bouton On/Off** pour effacer les connexions **Bluetooth**. Ou cliquez sur le **bouton On/Off** pour annuler et passer à l'option suivante.

Connectés
Bluetooth
4 Appareils

Bluetooth réinitialisé
Maintenir pr démarrer
Cliquer pour annuler



4

Maintenez enfoncé le **bouton On/Off** pour modifier le réglage **Mode avion**. Ou cliquez sur le **bouton On/Off** pour annuler et quitter le menu spécial.

Mode
Avion

Mode avion
Maintenir pr démarrer
Cliquer pour annuler



Nettoyage et entretien

Pour garder votre appareil et ses composants en bon état de fonctionnement, vous devez les nettoyer régulièrement. Ceci est également important pour préserver votre santé.

Réservoir d'eau, joint et couvercle de l'humidificateur

Nettoyer quotidiennement avec de l'eau et une eau savonneuse (1 c.à.c de liquide vaisselle doux pour 4 litres d'eau).



Circuit et adaptateurs

Nettoyez chaque semaine avec de l'eau et une eau savonneuse.



Filtres

Rincer à l'eau le filtre réutilisable gris toutes les deux semaines.

Ne pas rincer le filtre jetable bleu.



Consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur l'entretien et le nettoyage.



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Spécifications sous réserve de modifications sans préavis. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com/respironics



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 États-Unis



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Allemagne



REF 1149586
1149586 R00
ZL 05/04/2021
French