

**PHILIPS**

*DreamStation 2*

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced

# Guia de início rápido para o **paciente**



# Efetuar a ligação ao DreamMapper

Sincronize o dispositivo com o seu tablet ou telemóvel utilizando a aplicação DreamMapper, disponível na App Store e no Google Play.



1

Com o dispositivo e o telemóvel ligados e próximos um do outro, inicie a configuração do **Bluetooth** e o emparelhamento no **DreamMapper**. Siga as instruções de emparelhamento no **DreamMapper**.



2

Um **PIN de 6 dígitos** surge no ecrã do DreamStation 2. Dependendo do seu telemóvel, terá de introduzir o **PIN** no **DreamMapper** ou tocar em "Emparelhar" no ecrã do dispositivo em 30 segundos para concluir o emparelhamento.

Bluetooth

000000

Cód. pedido emparelh.

Emparelhar

Cancelar



3

O ecrã apresenta "A Emparelhar com o Dispositivo" e, em seguida "Éxito: Dispositivo Emparelhado".

Bluetooth

Éxito

Dispositivo emparelhado



# Iniciar a terapia

Para iniciar a terapia, prima o **botão de Terapia**. Um **círculo azul** indica que a terapia está ativada.

Ecrã táctil interativo

Ícone de humedificação

Botão de terapia



## Pressão de terapia

Um **círculo de cor sólida** indica que a pressão prescrita está a ser administrada. Um **círculo a tracejado** indica que pressão de Ramp Plus está a ser administrada.



Ícone de Ramp Plus

Ícone de temperatura da tubagem aquecida

**Nota:** Se o ecrã se apagar após 60 segundos de inatividade, basta tocar no ecrã para ativar o dispositivo se pretender efetuar alterações adicionais. Esta ação irá também reiniciar, simultaneamente, a função de Ramp Plus.

## Personalizar as suas definições

### Ramp+

A função **Ramp+** permite-lhe definir uma pressão inicial confortável enquanto adormece.

1. Toque no ícone de **Ramp+** para ver e ajustar a pressão de **Ramp+**.
2. Toque nos **símbolos + ou -** até alcançar uma definição confortável. A definição **Ramp Plus** pode ser desligada ou definida para um valor entre 4 e 10 cm H<sub>2</sub>O.
3. Toque em "**Confirmar**" para guardar a definição.


Uma vez definida a **Ramp+**, a definição é guardada e ativada automaticamente para futuras sessões de terapia sem ter de tocar novamente no ícone **Ramp+**.



### Humidificação (se disponível)

1. Toque no ícone de **humidificação** para visualizar a definição atual.
2. Toque novamente até alcançar um nível de humidade preferencial. A humidificação pode ser desligada ou definida para um valor entre 1 (mínimo) e 5 (máximo).


Uma vez definida a **humidificação**, a definição é guardada e ativada automaticamente para futuras sessões de terapia.

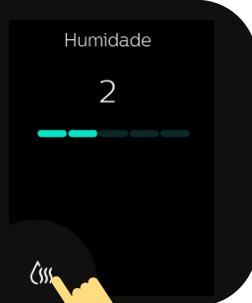

### Temperatura da tubagem aquecida (se disponível)

1. Toque no ícone de **tubagem aquecida** para visualizar a definição da temperatura atual.
2. Toque novamente até alcançar a temperatura preferencial. O aquecimento pode ser desligado ou definido para um valor entre 1 (mínimo) e 5 (máximo).

Uma vez definida a **temperatura**, a definição é guardada e ativada automaticamente para futuras sessões de terapia.

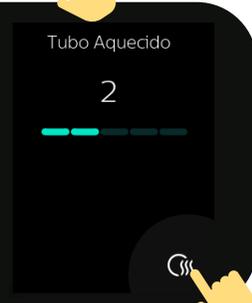

# Resumo de dados da terapia

Para parar o fluxo de ar, prima o **botão de Terapia**. É apresentado um resumo dos dados da terapia. O acesso a determinadas informações dependerá das definições do seu fornecedor.

## Ecrã Última Sessão

A informação a **azul** indica que pode tocar para saber mais ou executar uma ação.

Última Sessão 

Horas Utilização **0:00**

Dias 4 horas+ **0/21**

IAH **0.0**

Ajuste da Másc. **Bom**

Definições

1

O **ecrã Horas Utilização** apresenta o intervalo de tempo durante o qual recebeu terapia em horas e minutos durante as últimas 3 sessões.

[< Retroceder](#)

Horas Utilização

Abaixo encontram-se as suas horas de utilização para os últimos 3 dias.

<b>0:00</b>	<b>0:00</b>	<b>0:00</b>
Há 2 Dias	Há 1 Dia	Última Sessão

2

O ecrã **AHI** (IAH) apresenta o valor do Índice de apneia/hipopneia (IAH) para o intervalo de tempo correspondente a um dia mais recente (se ativado pelo seu fornecedor).

< Retroceder

IAH

Este índice representa o número de eventos de apneia e hipopneia por hora de sono.

0.0

Última Sessão

3

O ecrã **Ajuste da Másc** mostra o ajuste da máscara na sua última sessão. Pode igualmente realizar uma verificação do ajuste da máscara. Coloque a máscara e toque em "**Iniciar**" para iniciar a verificação do ajuste da máscara.

< Retroceder

Ajuste Másc.

Pode verificar o ajuste da sua máscara antes de começar a terapia.

Bom

Última Sessão

Iniciar

# Definições

## Conforto, dispositivo e dados

O acesso a determinadas informações dependerá das definições do seu fornecedor.

1

Para efetuar ajustes a definições e para aceder a informações adicionais, toque em "Definições".

Última Sessão 

Horas Utilização 0:00

Dias 4 horas+ 0/21

IAH 0.0

Ajuste da Másc. Bom

Definições

2

Ajuste as definições de Conforto disponíveis. A informação a azul indica que pode tocar para efetuar alterações.

- Duração e pressão da Ramp Plus
- Humidade
- Tubo Aquecido (se disponível)
- Tamanho da tubagem
- FLEX

< Retroceder

Conforto

 Ramp+ 15 Min, 4.0

 Humidade Dest 

 Tubo Aquecido Dest

 FLEX 3

3

Deslize para cima para ver informações adicionais sobre o dispositivo, como por exemplo como ajustar o modo de avião, limpar emparelhamentos Bluetooth e repor a hora ou o idioma.

Toque nas informações a azul para efetuar alterações. Pode igualmente ver o número de série do dispositivo, a versão de software e o estado do modem.



4

Toque em "Ver relatórios" para selecionar um intervalo de datas e visualizar resumos de dados da terapia adicionais.

Para sair das Definições a qualquer altura, toque em "Voltar" para voltar ao ecrã Última Sessão.



Consulte o Manual do Utilizador para obter informações detalhadas sobre a resolução de problemas.

# Limpeza e manutenção

Para manter o seu dispositivo e os componentes a funcionar devidamente, deve limpá-los regularmente. Isto é igualmente importante para manter a sua boa saúde.

## Reservatório de água do humidificador, vedante e tampa

Limpe diariamente com água e detergente de louça suave.



## Tubagem e adaptadores

Limpe semanalmente com água e detergente de louça suave.



## Filtros

Lave o filtro cinzento reutilizável a cada duas semanas com água.

Não lave o filtro azul descartável.



**Consulte o Manual do Utilizador para obter informações detalhadas sobre os cuidados a ter e a limpeza.**



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips N.V. ou dos respetivos proprietários.

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



Respironics Inc.  
1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 EUA



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG  
Gewerbestrasse 17  
82211 Herrsching, Alemanha



**REF** 1151722  
1151722 R01  
RWS 04/26/2021  
Portuguese