

PHILIPS

DreamStation 2

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced

Hurtigstartsvejledning
til **patient**



Forbindelse oprettes til DreamMapper

Synkroniser din enhed til din tablet eller mobiltelefon ved hjælp af DreamMapper-appen, der er tilgængelig i App Store og Google Play.



1

Med enheden og mobiltelefonen tændt og i umiddelbar nærhed, start **Bluetooth**-opsætning og -parring i **DreamMapper**. Følg parningsinstruktionerne i **DreamMapper**.




2

En **6-cifret pinkode** vises på DreamStation 2-skærmen. Afhængigt af din telefon skal du enten indtaste **pinkoden** i **DreamMapper** eller trykke på **"Par"** på enhedens skærm indenfor 30 sekunder, for at fuldføre parringen.



3

Skærmen viser **"Parrer til apparat"** og derefter **"Udført: Apparat er nu parret"**.

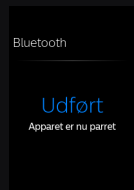



Kom i gang med behandling

For at begynde en behandling, tryk på **Behandlingsknappen**. En **blå ring** indikerer at behandlingen er i gang.

Interaktiv berøringskærm

Ikon for befugtning

Behandlingsknap

Behandlingstryk

En **solid ring** angiver, at det ordinerede tryk leveres. En **punkteret ring** angiver, at Ramp Plus-tryk leveres.



Ramp Plus-ikon

Ikon for opvarmet rørs temperatur

Bemærk: Hvis skærmen bliver mørk efter 60 sekunder uden aktivitet, skal du blot trykke på den for at vække anordningen, hvis du ønsker at foretage yderligere ændringer. Dette vil også samtidig genstarte Ramp Plus.

Tilpas dine indstillinger

Ramp+

Funktionen **Ramp+** giver dig mulighed for at indstille et behageligt starttryk, mens du falder i søvn.

1. Tryk på ikonet **Ramp+** for at se og justere dit **Ramp+**-tryk.
2. Tryk på **+** eller **-** **symbolerne** indtil du når en behagelig indstilling. **Ramp+**-indstillinger kan slukkes eller indstilles fra 4 til 10 cm H₂O.
3. Tryk på "**Bekræft**" for at gemme indstillingen.


Når **Ramp+** er indstillet, vil det blive gemt og automatisk aktiveret igen for fremtidige behandlingssessioner, uden at man behøver at trykke på **Ramp+**-ikonet igen.



Befugtning (hvis tilgængelig)

1. Tryk på ikonet **Befugtning** for at se din aktuelle indstilling.
2. Tryk igen, indtil du når det foretrukne fugtighedsniveau. Befugtning kan slukkes eller indstilles fra 1 (minimum) til 5 (maksimum).


Når **Befugtning** er indstillet, vil det blive gemt og automatisk aktiveret igen for fremtidige behandlingssessioner.

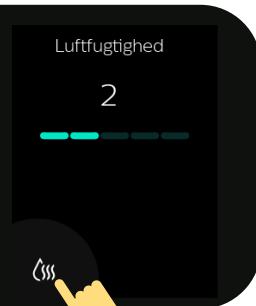

Opvarmet rørs temperatur (hvis tilgængelig)

1. Tryk på ikonet **Opvarmet rør** for at se din aktuelle indstilling.
2. Tryk igen, indtil du når din foretrukne temperatur. Varme kan slukkes eller indstilles fra 1 (minimum) til 5 (maksimum).

Når **temperaturen** er indstillet, vil den blive gemt og automatisk aktiveret igen for fremtidige behandlingssessioner.

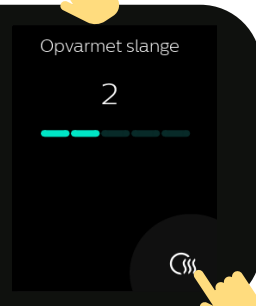


Oversigt over behandlingsdata

For at stoppe luftstrømmen, tryk på **Behandlingsknappen**. En oversigt over dine behandlingsdata vises. Adgang til bestemte oplysninger afhænger af, hvad din behandler har indstillet.

Skærbilledet Seneste session

Information i **blåt** indikerer at du kan trykke på dem for at lære mere eller foretage en handling.

Seneste session 

Behandlingstimer **0:00**

Dage med < 4 t. **0/21**

AHI **0.0**

Masketilp. **God pasf.**

Indstillinger

1

Skærbilledet **Behandlingstimer** viser den tid, du har modtaget behandling i timer og minutter i løbet af dine sidste 3 sessioner.

[< Tilbage](#)

Behandlingstimer

Nedenfor vises dine brugstimer for de seneste 3 dage.

0:00

2 dage siden

0:00

1 dag siden

0:00

Seneste session

2

Skærbilledet AHI viser apnø/hypopnø-indeksværdier (AHI) for den seneste tidsramme på en dag (hvis din behandler har aktiveret dette).

< Tilbage

AHI

Dette indeks viser antallet af apnøer og hypopnøer

0.0

Seneste session

3

Skærbilledet Maske viser hvordan din maske passede under din seneste session. Du kan også køre et Masketilpasningstjek. Tag din maske på, og tryk på "Start" for at påbegynde Masketilpasningstjekket.

< Tilbage

Maske

Du kan kontrollere maskens pasform

God pasf.

Seneste session

Start


Indstillinger

Komfort, anordning og data

Adgang til bestemte oplysninger afhænger af, hvad din behandler har indstillet.

1

For at foretage justeringer af indstillingerne og få adgang til yderligere oplysninger, skal du trykke på "Indstillinger".

Seneste session 

Behandlingstimer 0:00

Dage med < 4 t. 0/21

AHI 0.0

Masketilp. God pasf.

Indstillinger

2



Juster tilgængelige indstillinger for Komfort (Komfort). Information i blått indikerer at du kan trykke på dem for at foretage ændringer.

- Ramp Plus-tid og -tryk
- Luftfugtighed
- Opvarmet slange (hvis tilgængelig)
- Rørstørrelse
- FLEX


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
< Tilbage

Komfort

 Ramp+ 15 Min, 4.0 

 Luftfugtighed Fra 

 Opvarmet slange Fra 

 FLEX 3 

3

Stryg opad for at se yderligere enhedsoplysninger, som f.eks. justering af flytilstand, rydning af Bluetooth-parring og nulstilling af tid eller sprog.

Tryk på informationen i **blåt** for at foretage ændringer. Du kan også se anordningens serienummer, softwareversion og modemstatus.

< Tilbage

Apparat

Flymodus **Fra**

Bluetooth **4 Parret**

Klokkeslæt **10:00 PM**

Sprog **Dansk**

SN D0SIM00000010A

4

Tryk på "**Vis rapporter**" for at vælge datointerval og se yderligere oversigter over behandlingsdata.

For at forlade **Indstillinger** kan du til enhver tid trykke på "**Tilbage**" for at vende tilbage til skærbilledet **Seneste session**.

< Tilbage

SN D0SIM00000010A

Software D1.0.1.3695

Modem-opk. **10/30/00**

Vis rapporter

Se din brugsanvisning for detaljerede oplysninger om fejlfinding.

Rengøring og vedligeholdelse

For at holde anordningen og komponenterne i god stand skal du rengøre dem regelmæssigt. Det er også vigtigt for at bevare dit gode helbred.


Befugterens vandtank, tætning og låg

Rengør dagligt med vand og mildt opvaskemiddel.



Slanger og adaptorer


Rengør ugentligt med vand og mildt opvaskemiddel.

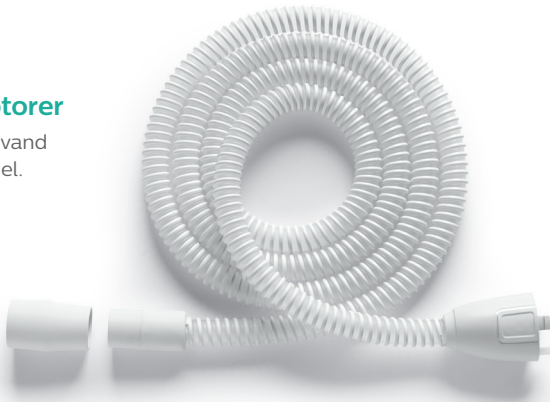

Filtre

Skyl det grå, genanvendelige filter hver anden uge med vand.

Skyl ikke det blå filter til engangsbrug.

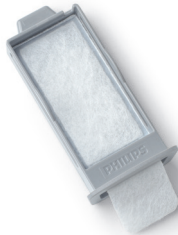

Se din brugsanvisning for detaljerede oplysninger om pleje og rengøring.



© 2021 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com/respironics



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Tyskland



REF 1151723
1151723 R01
RWS 04/26/2021
Danish