

Informations pratiques

Dimensions	16,5 cm x 16,5 cm x 11 cm
Poids	1,5 kg

Qu'y a-t-il dans la boîte ?



InnoSpire Elegance



Nébuliseur SideStream
usage unique par patient
(remplacer après 1 mois)



Masque adulte



Masque enfant



Tubulure du circuit d'air



Embout buccal



4 filtres de remplacement

En savoir plus

www.philips.fr/asthme

Références:

[1] Hatley H. M., Potter R, Degtyareva Y. (2014). Measures of aerosol quality: respirable delivered dose and non-respirable delivered dose. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery. 27. A22-A22.

[2] Shah P.L., Scott S.F., Geddes D.M., Conway S., Watson A., Nazir T., Carr S.B., Wallis C., Marriott C., Hodson. M.E. An evaluation of two aerosol delivery systems for rhDNase. European Respiratory Journal, 1997 10;1261-1266.

[3] Nebulizer therapy. Guidelines. British Thoracic Society Nebulizer Project Group. Thorax 1997; 52 (Suppl. 2): S4-24.



InnoSpire Elegance est un compresseur pour nébuliseur, destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients (enfants et adultes) nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. Il doit être utilisé avec un nébuliseur pneumatique (jet) qui produit des particules de médicaments sous forme d'aérosol, en suivant les instructions d'un médecin. SideStream fabriqué par Philips est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance du médicament. Le masque SideStream fabriqué par Philips est destiné à être utilisé avec les nébuliseurs de la gamme SideStream de Philips. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

© 2018 Koninklijke Philips NV. Tous droits réservés. Les spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis. Resprionics Inc. et Resprionics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd sont des filiales de Philips.

www.philips.fr/Asthme/Innospire-SideStream

MLJ 01/01/2019 PN2051904

PHILIPS

InnoSpire Elegance

Système de compresseur pour nébuliseur

Pour un
**traitement
efficace
et rapide
de votre
asthme^{1,2,3}**

Vous aider à adopter votre traitement

Philips InnoSpire Elegance assure une administration rapide, efficace et fiable^{1,2,3} des aérosols, pour un traitement continu à l'hôpital et à domicile.



Une administration d'aérosol fiable et rapide^{1,2,3}



Conception moderne et robuste

InnoSpire Elegance a été conçu pour une utilisation fréquente et pour se fondre dans votre quotidien.




Compatible avec les médicaments généralement prescrits

Capable de nébuliser une grande variété de médicaments couramment utilisés avec les nébuliseurs.



Temps de traitement : 6 à 8 minutes*

Associé au nébuliseur SideStream, InnoSpire Elegance est conçu pour permettre une administration facile et rapide des médicaments et des temps de traitement courts.^{1,2,3}

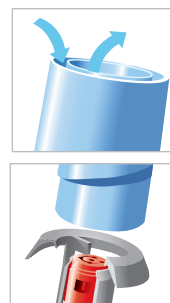

Une technologie de nébulisation éprouvée^{1,2,3}

- Système Venturi intégré dans la partie supérieure du nébuliseur, conçu pour aspirer plus d'air et réduire les temps de traitement.
- Système de buse conçu pour résister à une utilisation fréquente et répétée et préserver la qualité du traitement

En savoir plus

www.philips.fr/Asthme/InnoSpire-SideStream

* Avec 2,5 ml de salbutamol

Une utilisation simple au quotidien

Comment utiliser votre nébuliseur SideStream

1. Placer le compresseur sur une surface solide.
2. Raccorder le tuyau au compresseur et à la chambre médicamenteuse
3. Dévisser le couvercle
4. Remplir la chambre médicamenteuse.
5. Replacer le couvercle. Connecter l'embout buccal.
6. Ne pas incliner le nébuliseur SideStream.
7. Brancher le compresseur
8. Mettre l'interrupteur en position de marche.
9. S'asseoir droit, se détendre et inspirer et expirer lentement.

Si vous avez besoin d'utiliser un masque adulte ou enfant SideStream...

1. Remplacer l'embout buccal par l'adaptateur de masque et le masque.
2. Placer le masque sur le nez et la bouche.
3. Placer l'attache autour de la tête et la régler.

Instructions de nettoyage Après chaque utilisation...

1. Déconnecter le tuyau du corps du nébuliseur.
2. Démontez et lavez toutes les pièces à l'eau chaude et savonneuse (sauf le tuyau).
3. Rincer à l'eau claire et laisser sécher à l'air.

Une fois par semaine...

1. Placer les pièces (sauf le tuyau) dans de l'eau et ajouter 2 – 3 gouttes de liquide vaisselle.
2. Faire bouillir 10 minutes.
3. Rincer à l'eau claire pendant 2 minutes et laisser sécher à l'air.

Retrouvez les guides d'utilisation et de nettoyage d'OptiChamber Diamond en vidéo sur www.philips.fr/Asthme/InnoSpire-SideStream