

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

*DreamWear*


Næsemaske

# Størrelsesguide

## Instruktioner:

- 1 Udskriv denne Adobe PDF-fil i størrelsesforholdet 100 % på din printer. Brug skabelonen til højre for at tjekke udskriftsnøjagtigheden.
- 2 Fold denne side fornedens langs den stiplede linje.
- 3 Klip langs den stiplede linje omkring måleenheden til valg af størrelse.
- 4 Placer måleenheden under din næse som vist på billedet nedenfor.
- 5 Vælg den størrelse, som passer i forhold til din næses størrelse. (S – Small, M – Medium eller L – Large)

Philips Respironics anbefaler altid at kontakte en læge eller autoriseret søvnterapeut for at få masken tilpasset og sikre, at den sidder, som den skal.

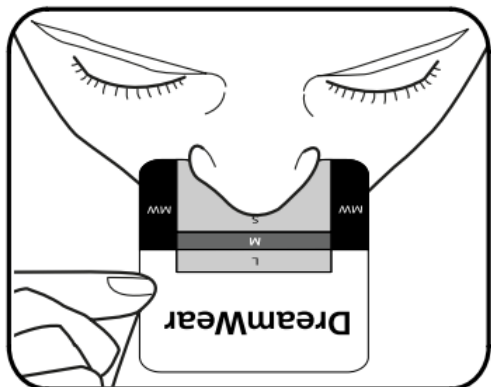

FOLD langs den stiplede linje

## Udskriftsnøjagtighed



## Måleenhed

KLIP langs den stiplede linje

