

So einfach wie Zähneputzen

1. Vorbereiten

Öffnen Sie einfach die grüne Abdeckung und geben Sie das Medikament hinein. Schliessen Sie die Abdeckung wieder und lassen Sie Ihr Kind aufrecht sitzen, um mit der Behandlung zu beginnen.



2. Anwenden

Drücken Sie auf die Einschalttaste und ermutigen Sie Ihr Kind dazu, durch das Mundstück ein- und wieder auszuatmen.**

Der InnoSpire Go gibt hörbare und sichtbare Signale aus, wenn die Behandlung abgeschlossen ist – und schaltet sich anschliessend selbst aus.



3. Reinigen

Nehmen Sie das Mundstück nach jeder Behandlung ab und spülen Sie es mit warmem Wasser. Reinigen Sie es jeden Abend in warmem Seifenwasser und desinfizieren Sie es einmal wöchentlich in kochendem Wasser.



Mehr Informationen

www.philips.ch/innospire-go



* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.
** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist ausserdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.



PHILIPS

InnoSpire Go

Tragbarer
Mesh-Vernebler

**Kinderleicht
durchatmen**

Die Kindheit unbeschwert geniessen

Durch sein geringes Gewicht, die unkomplizierte Handhabung und die schnelle, fast lautlose Wirkweise, eignet sich der InnoSpire Go Vernebler ideal für die Aerosoltherapie Ihres Kindes. Er ist zu Hause genauso einsetzbar wie auf dem Spielplatz und befreit Ihr Kind und Sie von vielen Einschränkungen und Sorgen.

Wirksame Therapie, einfach griffbereit



Behandlung in 4 Minuten*

Der InnoSpire Go ermöglicht eine wirksame Therapie. Bei Abschluss der Behandlung sendet er hörbare und sichtbare Signale – und schaltet sich anschliessend selbst ab.



Nahezu geräuschlos

Der kleine, tragbare Vernebler, für den es auch eine zusätzliche Maske gibt, lässt sich überall einfach und wirksam verwenden.



Integrierter langlebiger Akku

Mit dem wiederaufladbaren Akku sind bis zu 30 Behandlungen möglich, bevor dieser aufgeladen werden muss.



Einfacher Aufbau – nur zwei Einzelteile

Dank des aufsetzbaren Mundstücks lässt sich der InnoSpire Go einfach verwenden, reinigen und pflegen.**



← Tatsächliche Grösse →

Mehr Informationen

www.philips.ch/innospire-go



* Bei Verwendung von 2,5 ml Salbutamol.

** Für Kinder, die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Mundstück haben, ist ausserdem eine Maske im Lieferumfang enthalten.