

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamWear


Sömnapnémask

# Storleksguide

## Anvisningar:

- 1 Skriv ut denna Adobe PDF-fil på 100 % på din skrivare. Använd kontrollen av utskriftsprecision för att säkerställa att utskrift i rätt storlek.
- 2 Vik den nedre delen av den här sida längs den streckade linjen.
- 3 Klipp längs den streckade linjen runt storleksmallen.
- 4 Placera storleksmallen på din näsa såsom bilden nedan illustrerar.
- 5 Fastställ rätt storlek efter vilket område nästippen når.  
(S – Small, M – Medium eller L – Large)

Philips Respironics rekommenderar att du alltid rådfrågar en läkare eller registrerad sömnterapeut för utprovning av masken för att säkerställa en korrekt storlek och passform.

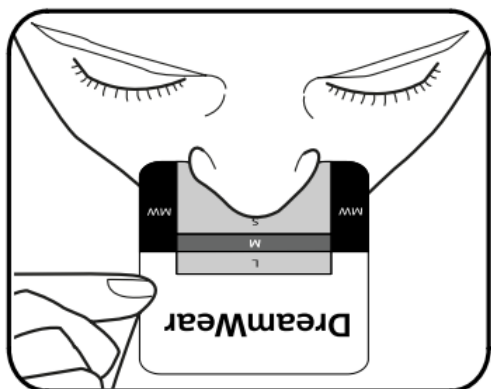


VIK längs den streckade linjen

## Kontroll av utskriftsprecision



## Storleksmall

KLIPP längs den prickade linjen

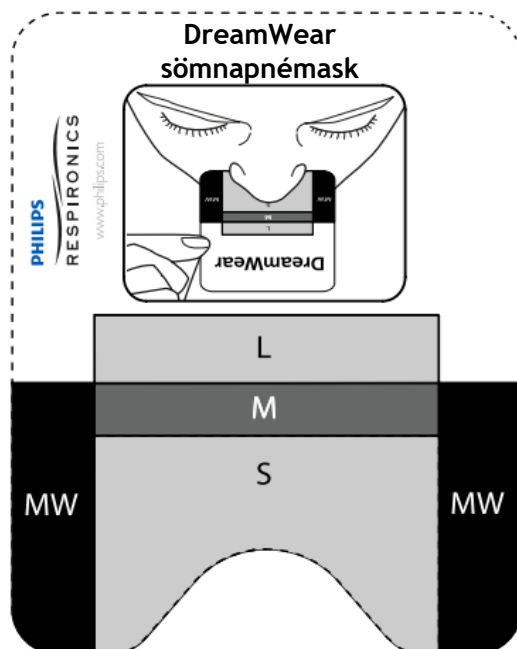

KS 20/05/27 PN3737019