

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamWear


Nesemaske for
under nesen

Størrelsesveiledning

Instruksjoner:

- 1 Skriv ut denne Adobe PDF-filen i 100 % på skriveren din. Bruk utskriftskontrollen til høyre for å sikre at du skriver ut i riktig størrelse.
- 2 Brett den nederste delen av denne siden der den stiplede linjen viser.
- 3 Klipp langs den stiplede linjen rundt tilpasseren.
- 4 Plasser tilpasseren under nesen som vist på bildet nedenfor.
- 5 Avgjør riktig størrelse alt etter hvilket område nesen din når.
(S – Small, M – Medium eller L – Large)

Philips Respironics anbefaler alltid at du kontakter en lege eller autorisert søvnspesialist for å få tilpasset en maske og være sikker på at den har riktig størrelse og passform.

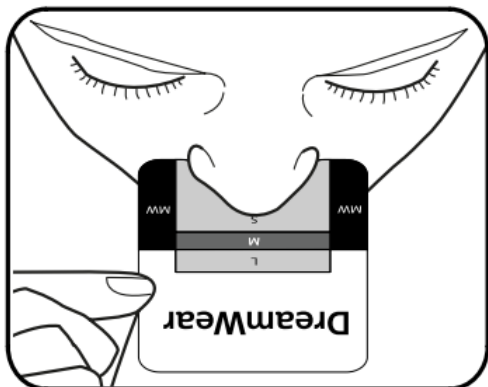


BRETT langs stiplet linje

Utskriftskontroll



Tilpasser

KLIPP langs stiplet linje

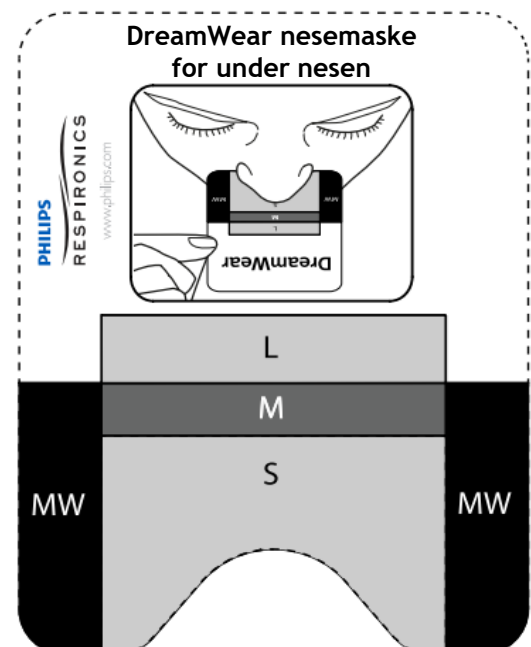

KS 20/05/27 PN3737019