


Philips BlueTouch
App-gesteuertes
BlueTouch-Gerät

Bei muskulären
Rückenschmerzen

Inklusive Band für den oberen
Rücken
Kompatibel mit iOS und Android

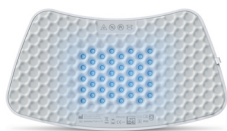

PR3741/00

Schmerzlinderung im Rücken – ganz ohne Medikamente

Klinisch nachgewiesene* Therapie mit blauem Licht

Das Philips BlueTouch verwendet zur innovativen Schmerztherapie blaues Licht mit doppelter Wirkung. Es bietet dadurch angenehme Wärme und regt gleichzeitig die Freisetzung von körpereigenem Stickstoffmonoxid an. Das Ergebnis ist eine verbesserte lokale Durchblutung, die den natürlichen Heilungsprozess des Körpers unterstützt.

Innovative Technologie mit blauem LED-Licht

- Verwendet blaues LED-Licht auf einzigartige Weise zur Erhöhung der lokalen Durchblutung
- Zusätzliche beruhigende Wirkung durch Wärme zur Linderung von Rückenschmerzen

Fördert die lokale Durchblutung zur Schmerzlinderung

- Nutzt Wärme und die natürliche schmerzlindernde Wirkung von blauem Licht
- Behandlung ohne Medikamente

Steuern Sie Ihre Behandlung über ein iOS-/Android-Gerät

- Zeichnen Sie den Fortschritt Ihrer Behandlungen in einem Tagebuch auf
- Verwenden Sie die Behandlungs-App für volle Kontrolle über ein Smart-Gerät

2 Mal täglich bis zu 30 Min. zur Schmerzlinderung in 1 - 2 Wochen

- Ergebnisse innerhalb von ein bis zwei Wochen spürbar
- Kurze Behandlungszeiten, 3 Intensitätsstufen
- Probieren Sie es aus: 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie

Besonderheiten

40 optimierte blaue LEDs



40x

Das BlueTouch ist mit 40 blauen LEDs ausgestattet, die therapeutisches Licht erzeugen. Blaues Licht liefert Wärme und regt die natürliche Freisetzung von NO im Körper an. Dies erhöht die Durchblutung, wodurch wiederum die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung verbessert wird und Stoffwechselprodukte abtransportiert werden. Dadurch wird der Heilungsprozess der betroffenen Muskeln im Behandlungsbereich unterstützt.

Wohltuende Wärme



Das BlueTouch erzeugt zudem Wärme, die der Entspannung der Muskeln dient und so zur Linderung von Rückenschmerzen beiträgt und dem Benutzer ein Gefühl des Wohlbefindens verschafft.

Linderung von Rückenschmerzen ohne Medikamente

Philips BlueTouch nutzt die Wärme von blauem Licht und fördert dadurch den natürlichen Heilungsprozess zur Linderung von Rückenschmerzen ohne Medikamente.

Natürliche Linderung von Rückenschmerzen

Der große Vorteil der Therapie mit blauem LED-Licht liegt in ihrer Natürlichkeit. Durch das blaue Licht werden ausschließlich körpereigene Prozesse angeregt. Trifft blaues LED-Licht auf die menschliche Haut, werden dort vom Körper Stickstoffmonoxidmoleküle (NO) freigesetzt und bis zum schmerzenden Muskel im Rücken transportiert. Dort zeigen die kleinen Moleküle große Wirkung und können Rückenschmerzen auf natürliche Weise lindern.

Verwenden Sie die kostenlose Behandlungs-App



Unsere speziell entwickelte App erleichtert die Auswahl und Steuerung der Schmerzbehandlung.

Behandlungsübersicht im Tagebuch

Das Behandlungstagebuch ist Teil der Behandlungs-App. Durch Tippen auf die Tagebuchfunktion erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den Verlauf Ihrer Behandlung. Verwenden Sie diese Übersicht

zur Optimierung der Behandlung Ihrer Rückenschmerzen.

Anwendungsdauer



3x

Das Philips BlueTouch kann bis zu zweimal täglich angewendet werden. Die Länge der einzelnen Behandlungen hängt von der gewählten Intensitätsstufe ab: In Modus 1 (sanft) sollte das Gerät maximal 30 Minuten verwendet werden, in Modus 2 (medium) 20 Minuten und in Modus 3 (stark) 15 Minuten pro Behandlung. Die Intensitätsstufe kann nach eigenem Empfinden ausgewählt werden und unterscheidet sich neben der Lichtintensität auch in ihrer Temperatur. Bei täglicher Anwendung kann das BlueTouch dank der Wirkweise des blauen LED-Lichts zur wirksamen Linderung der Rückenschmerzen beitragen.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Lieferumfang

- BlueTouch-Schmerztherapiegerät
- Rückenband für den oberen Rücken
- Adapter

Anwendungsgebiete

- Bei muskulären Rückenschmerzen
- oberer Rücken

Verwendung

- Bis zu zweimal pro Tag
- Modus 1 (Niedrig): Täglich zweimal 30 Min.
- Modus 2 (Mittel): Täglich zweimal 20 Min.
- Modus 3 (Hoch): Täglich zweimal 15 Min.

Technische Daten

- Nennspannung: 100 V - 240 V
- Nennleistungsleistung: 15 W
- Nennfrequenz: 50 - 60 Hz
- Class: Medizinische Geräteklasse: IIa
- Klassifizierung: Risikogruppe 1

- Eintreten von Wasser: IP22
- Maximale Tagesdosis: < 90 J/cm²
- Batterietyp: Li-Ion
- Wellenlänge blaues LED-Licht: 453 nm

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht BlueTouch: 0,168 kg
- Maße BlueTouch (B x H x T):
280 x 155 x 12,5 mm

Software

- iPhone®-Kompatibilität: Version iOS7 und höher, iPhone® 4S und neuer
- iPad®-Kompatibilität: Version iOS7 und höher, iPad® der 3. Generation, iPad Air™, iPad mini™ und neuer
- iPod®-Kompatibilität: Version iOS7 und höher, iPod touch® der 5. Generation und höher
- Android-Kompatibilität: Android 4.4 KitKat und höher



Ausstellungsdatum
2015-06-22

Version: 2.4.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (Universitätsklinik Heidelberg), 24.
Deutscher interdisziplinärer Schmerz- und Palliativkongress,
Frankfurt/Main, Vortrag 7. März 2013 über die Verwendung von
BlueTouch bei chronischen Rückenschmerzen im Muskel-Skelett-
Bereich.