

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
CS & オペレーション本部
テクニカルサポート

IntelliVue生体情報モニタ 計画停電時の対応について

停止方法（電源オフ）に関する内容

1. 本装置で患者様のモニタリングをしていない場合、電源 ON/OFF スイッチで電源をお切りください。
2. 本装置で患者様をモニタリング中の場合、停電開始時間前までに予め電源ケーブルを停電しないと分かっているコンセントに繋ぎかえることをお勧めいたします。
3. MP2/X2、MP5、MP20/30、MP40/50 でバッテリーを搭載している場合には停電中でもバッテリーでの動作が可能です。予めバッテリー残量の確認をお勧めいたします。また、各装置別のバッテリー動作時間につきましては取扱説明書をご確認ください。

起動方法（電源オン）に関する内容

IntelliVue 患者情報センタ（以降、セントラルモニタ）に繋がっている場合には、停電終了後にセントラルモニタに本装置の波形が表示されること、本装置で起きたアラームがセントラルモニタでもアラーム音と表示でアラームの発生を知らせることをご確認ください。

停止、起動方法の手順詳細につきましては各モデルの取扱説明書をご確認ください。

尚、ご不明な点は弊社カスタマーコールセンター(0120-556-494 / 03-3740-3213)までご連絡ください。